

patron®

INFORMACJE DOT. UŻYTKOWANIA (pl)
=> wyrób medyczny: wózek-rehabilitacyjny

PIPER **(wersja Comfort / rozmiary: UNI)**



Produkcja i Dystrybucja:

PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419, CZ- 27601 Mělník, Czechy
tel.: +420-315 630 111
[http:// www.patron.eu](http://www.patron.eu)

SCHEMAT






PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	PIC34
Wysokość oparcia (mm)	680
Głębokość siedziska (mm)	290
Szerokość siedziska (mm)	Od 260 do 340
Odległość od siedziska do podnóżka (mm)	240-370
Nachylenie oparcia	90°-125°
Nachylenie siedziska	+25°
Całkowita długość (mm)	1080
Całkowita szerokość (mm)	590
Całkowita wysokość / z uchwytem do pchania (mm)	1000
Masa całkowita (kg)	14,5
Maksymalne obciążenie (kg)	50,0
Długość złożonego wózka (mm)	1020
Szerokość złożonego wózka (mm)	330
Wysokość złożonego wózka (mm)	280

OPIS SCHEMATU

- | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | Uchwyt do pchania | 18. | Zabezpieczenie transportowe |
| 2. | Zawias składania uchwytu | 19. | Oparcie |
| 3. | Pas bezpieczeństwa | | |
| 4. | Podpórka tydek | | |
| 5. | Zawias podpórki tydek | | |
| 6. | Podnóżek | | |
| 7. | Trzpień blokujący podnóżek | | |
| 8. | Przyciski do demontażu podnóżka | | |
| 9. | Przednie koła | | |
| 10. | Blokada kierunkowa | | |
| 11. | Przednie koła skrętne | | |
| 12. | Tylne koła | | |
| 13. | Przyciski do demontażu tylnych kół | | |
| 14. | Pedał hamulca | | |
| 15. | Pedał do rozkładania | | |
| 16. | Uchwyt/Rączka do składania | | |
| 17. | Blokada nachylenia oparcia | | |

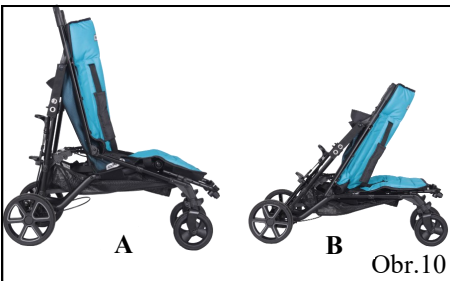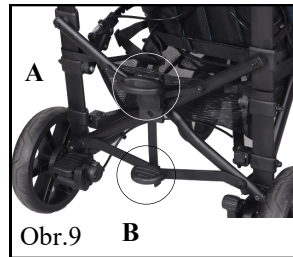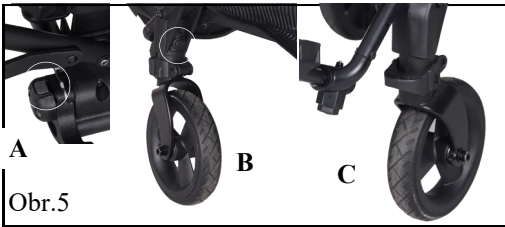

WPROWADZENIE:

Szanowni Państwo, prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem wyrobu. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyrobu i jego prawidłowego użycia, należy skontaktować się z profesjonalnym personelem lub centrum serwisowym. Wszelkie poważne zdarzenia niepożądane związane z wyrobem lub pogorszenie stanu zdrowia użytkownika w związku z użytkowaniem wyrobu należy niezwłocznie zgłaszać oficjalnemu dystrybutorowi wyrobu w Państwa kraju lub producentowi wyrobu. Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i/lub usunięcia tego produktu, a także deklarację zgodności produktu, proszę skontaktować się z oficjalnym dystrybutorem wyrobu w swoim kraju lub producentem. Należy zachować niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.



..... OSTRZEŻENIE, UWAGA:

- ① **UWAGA! Każdy ciężar zamocowany do uchwytu do pchania (torba, ...) wpływa na stabilność wózka!**
- ② **Nigdy nie zostawiać dziecka bez opieki!**
- ③ **Zalecane ciśnienie powietrza w oponach: 180 kPa**



.....maksymalne obciążenie.

OSTRZEŻENIE! Podczas używania wózka należy trzymać palce z dala od ruchomych części.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki! Nawet jeśli pasy i hamulce są w użyciu.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy blokujące są prawidłowo zablokowane i czy wszystkie elementy zabezpieczające są prawidłowo użyte.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany do płyty mocującej na ramie.

OSTRZEŻENIE! Fotelik nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 6 miesięcy życia.

OSTRZEŻENIE! Tego wyrobu nie wolno używać podczas joggingu lub jazdy na rolkach.

OSTRZEŻENIE! Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem wózka, a także zachować ją na przyszłość. Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone, jeśli nie będą Państwo przestrzegać wskazówek i uwag dotyczących bezpieczeństwa wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi.

WYRÓB - OPIS, CECHY, IDENTYFIKACJA:

Otrzymali Państwo wyrób, który jest przeznaczony do wszechstronnego codziennego użytku na zewnątrz, jak i wewnątrz domu. Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z jego obsługą, sposobem obchodzenia się z nim i działaniem wszystkich funkcji, aby uniknąć możliwości odniesienia obrażeń. W szczególności prosimy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Wszyscy użytkownicy i/lub osoby im towarzyszące muszą zostać przeszkoleni przez wykwalifikowany personel w zakresie obsługi wyrobu. Użytkownicy i / lub osoby im towarzyszące są zobowiązani do zapoznania się w szczególności z ryzykiem szczałkowym związanym z tym produktem, w związku z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi w niniejszej instrukcji.
- Wyrób został dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowe zmiany mogą być wprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Zalecamy indywidualne dostosowywanie wyrobu raz w roku, aby zapewnić optymalną konfigurację wyrobu dla użytkownika. Szczególnie w przypadku użytkowników ze zmieniającą się anatomią (np. wymiary ciała i waga) zaleca się dostosowanie co najmniej raz na sześć miesięcy.
- Państwa konkretny wyrób może różnić się od przedstawionych tutaj wariantów. W szczególności nie wszystkie opcjonalne akcesoria opisane w niniejszej instrukcji są zamontowane w Państwa wyrobie.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w konstrukcji opisanej w niniejszej instrukcji.

Cechy wyrobu:

Ten wyrób jest sklasyfikowany jako nieinwazyjny wyrób medyczny klasy 1. Wyrób jest przeznaczony do użytku krótko- i długoterminowego. Wyrób jest kontrolowany przez osobę towarzyszącą i służy do transportu dzieci z pomocą drugiej osoby. Wyrób jest przeznaczony do stosowania na twardej powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Wyrób jest przeznaczony dla dzieci z tymczasowym lub trwałym ograniczeniem zdolności chodzenia, niezdolnych do chodzenia lub utrzymywania pozycji stojącej. Wyrób jest odpowiedni dla użytkowników, których anatomia (np. wymiary ciała i waga) pozwala na używanie wyrobu w określonym celu i których skóra jest nienaruszona. Produkt może być używany wyłącznie w połączeniu z akcesoriami określonymi w formularzu zamówienia.

Producent tego wyrobu nie ponosi odpowiedzialności za kombinacje z wyrobami medycznymi i/lub akcesoriami innych producentów. Dozwolone są wyłącznie kombinacje produktów ocenione pod względem skuteczności i bezpieczeństwa. Takie połączenie wyrobu i akcesoriów musi być dozwolone i określone w umowie dotyczącej połączenia produktów.





Wskazania: od łagodnych do poważnych aż po całkowite ograniczenia ruchów użytkownika.

Przeciwwskazania: Przeciwwskazania bezwzględne nie są znane. Względne przeciwwskazania - brak fizycznych lub psychicznych warunków wstępnych, znaczne uszkodzenie tkanki powierzchniowej (np. skóry itp.).

Zjawiska towarzyszące: W wyjątkowych przypadkach podczas korzystania z wyrobu mogą wystąpić następujące zjawiska towarzyszące - ból mięśni szyi, ból mięśni i stawów, zaburzenia krążenia, ryzyko odleżyn. W przypadku wystąpienia tych zjawisk towarzyszących lub problemów, proszę skontaktować się z lekarzem lub terapeutą.

Identyfikacja wyrobu:

Informacje na etykiecie produktu:

	Globalny handlowy numer identyfikacyjny. Zgodnie ze standardem GS1 = UDI-DI - Unikalny Identyfikator Wyrobu - Identyfikator Wyrobu.
	Numer seryjny. Zgodnie ze standardem GS1 = UDI-PI - Unikalny Identyfikator Wyrobu - Identyfikator Produkcji.
	Identyfikacja producenta - wersja produktu
Mod.:	Wersja produktu / tekst
Spec.:	Wersja produktu / wersja kolorystyczna
	Producent - adres

Data produkcji: Numer seryjny (pierwsze 3 cyfry) zawiera datę produkcji. ("253" = 253 miesiące od 01.01.2000 = styczeń 2021)

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA:

- Osoba obsługująca musi być zaznajomiona z niniejszą instrukcją.
- Przed użyciem należy zasięgnąć profesjonalnej porady medycznej dotyczącej przydatności tego wyrobu.
- Przed odjazdem należy zawsze upewnić się, że dziecku jest wygodnie, a ubrania, kocyki itp. są schowane, aby nie wpadły pod koła.
- Wózek NIE MOŻE być używany jako fotelik dla dziecka podczas podróży pojazdem silnikowym lub autobusem, jeśli pojazd nie jest do tego przystosowany i jeśli wózek nie jest modelem przetestowanym zderzeniowo zgodnie z wymogami normy ISO 7176-19 lub dodatkowo ANSI/RESNA WC-4:2012 Sekcja 19 Załącznik A.
- Przed przystąpieniem do regulacji wózka należy upewnić się, że dziecko znajduje się z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas ustawiania nachylenia i regulacji siedziska oraz oparcia należy postępować ostrożnie, aby uniknąć nagłych niekontrolowanych ruchów.
- Nie pozwalać dziecku na samodzielne wsiadanie i wysiadanie z wózka.
- Podczas czynności wsiadania i wysiadania z wózka należy zawsze włączać hamulce postojowe.
- Wózek nie jest przeznaczony do jazdy po schodach.
- Proszę upewnić się, że akcesoria stabilizujące, barierka zabezpieczająca i inne elementy są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
- Nie stawać na podnóżku.
- Hamulce muszą być aktywne przez cały czas, gdy wózek się nie porusza.
- Najpierw proszę poćwiczyć pokonywanie krawężników z pustym wózkiem.
- Osoba obsługująca wózek musi podjąć środki ostrożności przeciwko zagrożeniu pożarowemu. W budynkach należy sprawdzić lokalizację wyjść przeciwpożarowych i upewnić się, że procedury są zrozumiałe.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się wózkiem ani wieszac się na nim.
- Podczas jazdy należy zachować pełną ostrożność, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji lub kolizji.
- Nie przeciążać wózka. Przeciążenie podwozia, siedziska, torby lub kosza powoduje zmniejszenie stabilności wózka.
- Podczas manewrowania wózkiem należy zachować pełną ostrożność, aby nie zranić dziecka ani siebie.
- Jeśli to możliwe, należy zawsze korzystać z podjazdów lub wind, aby pokonać wszelkie ograniczenia utrudniające dostęp.
- Wózek należy zawsze podnosić we dwie osoby.
- Nigdy nie należy przenosić wózka, jeśli użytkownik i/lub pomocnik nie są pewni, czy mogą bezpiecznie przenieść wózek z dzieckiem.
- Podczas jazdy wózkiem po drogach należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
- Proszę nie używać wózka do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.
- Wózek jest przeznaczony do przewożenia tylko jednego dziecka.
- Nie należy używać innych niż oryginalne akcesoria PATRON przeznaczone dla tego wyrobu.
- Podczas składania i rozkładania wózka należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi, aby uniknąć uszkodzeń konstrukcji, które mogłyby wpłynąć na stabilność wyrobu.
- W przypadku widocznej wady, która ogranicza bezpieczne użytkowanie wyrobu (np. uszkodzenie podwozia, odpadnięcie części lub inne wizualnie widoczne wady, pęknięcia itp.) należy natychmiast zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się z lokalnym oficjalnym dystrybutorem lub centrum serwisowym.
- Firma PATRON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z innych niż oryginalne akcesoria PATRON dostarczone przez tę firmę.
- Firma PATRON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego wyrobu.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA:

1) Montaż i regulacja wózka:

Rozkładanie wózka:

Położyć złożony wózek na ziemi.

Aby zamontować przednie koła skrętne - Wziąć oba koła skrętne, włożyć je i wcisnąć w gniazdo mocowania koła, aż usłyszą Państwo "kliknięcie" oznaczające, że koło zostało zablokowane. Uwaga, konieczne przy pierwszym montażu.

Aby zamontować tylne koła - Włożyć obie osie kół do gniazd mocujących i wcisnąć aż do zablokowania. Powinni Państwo usłyszeć "kliknięcie", które oznacza, że koło zostało zablokowane. Uwaga, konieczne przy pierwszym montażu.

Odpiąć zabezpieczenie transportowe (elem. 18). Proszę ustawić wózek w pozycji częściowo pionowej (zdj. 10a).

Sprawdzić położenie plastikowych klamer 5-punktowego pasa bezpieczeństwa, aby zapobiec ich zakleszczeniu, a następnie złamaniu podczas składania. Należy stanąć pomiędzy tylnymi kołami wózka i przy użyciu stopy nacisnąć pedał (zdj. 9b), aby rozłożyć wózek, aż do usłyszenia "kliknięcia", które oznacza, że rama jest całkowicie rozłożona i zablokowana. Następnie proszę zabezpieczyć uchwyt do składania, pociągając go do góry (zdj. 8), aż do zatrzaśnięcia zawiasu uchwytu.

Montaż podnóżka - Umieścić podnóżek we wsporniku po obu stronach przedniej ramy i wcisnąć aż do usłyszenia kliknięcia. Dokręcić podnóżek, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany.

Składanie wózka:

Aktywować hamulec postojowy.

Aby zdjąć podnóżek - Zdjąć podnóżek, naciskając przyciski po obu stronach przedniej ramy (zdj. 6).

Następnie proszę zwolnić oparcie (zdj. 7) i ustawić je w pozycji pionowej. Następnie należy zwolnić uchwyt do pchania, naciskając przycisk na przegubie uchwytu i złożyć go, popychając w dół - zawsze od siebie / do wózka (zdj. 8). Jeśli nie można łatwo złożyć uchwytu, należy upewnić się, że przycisk jest całkowicie i prawidłowo wciśnięty oraz że uchwyt jest złożony we właściwym kierunku (zgodnie ze strzałką)! Chwycić za rączkę rozpórki i pociągnąć do góry (rys. 9A). Złożyć wózek częściowo pociągając go do siebie i położyć go do przodu (zdj. 10). Zakończyć składanie, zapinając zabezpieczenie transportowe (element 18).

Aby zdemontować przednie koła skrętne - Nacisnąć przycisk wysuwania przedniego koła, aby zdjąć koła (zdj. 5b).

Aby zdemontować tylne koła - Nacisnąć przycisk zwalnający tylne koło, aby zdjąć koła (zdj. 5a).

Tapicerka:

Rozpakowywanie wózka - Wózek jest dostarczany z częściowo zdjętą tapicerką. Przed pierwszym użyciem należy przymocować tapicerkę do górnej części ramy podwozia. Należy użyć 4 zatrasków po obu stronach ramy. Nacisnąć na tapicerkę, aby upewnić się, że jest prawidłowo przymocowana.

Zdejmowanie i zakładanie tapicerki - Od góry ramy poluzować tapicerkę za pomocą zatrasków. Następnie poluzować rzepy i wypiąć pasy ze sprzączek pasów pięciopunktowych.

Aby zamocować tapicerkę, należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności.

Tapicerkę siedziska można prać ręcznie w niskiej temperaturze (maks. 40°C).

Regulacja długości podnóżka:

Wyciągnąć trzpień blokujący podnóżek po obu stronach przedniej ramy (zdj. 2). Wyregulować długość podnóżka, przesuając go odpowiednio po obu stronach, tak aby uda były prawie równoległe do siedziska wózka. Nie podnosić podnóżka zbyt wysoko, może to spowodować niewygodny nacisk na pośladki. Następnie należy włożyć trzpień blokujący. Należy pociągnąć podnóżek, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany. Usłyszą Państwo kliknięcie.

Hamulec postojowy:

Aby włączyć hamulec, należy nacisnąć pedał hamulca przy tylnym kole (rys. 4), popychając do przodu, upewnić się, że wózek jest zablokowany.

Aby zwolnić hamulec postojowy, należy podnieść pedał hamulca.

Blokada kierunkowa przednich kół:

W razie potrzeby widelce przednich kół można zablokować przed obrotem w osi pionowej.

Koła są zablokowane tylko w kierunku do jazdy na wprost.

Aby zablokować koło, należy docisnąć dźwignię blokady w dół (zdj. 5c).

Upewnić się, lekko pociągając za koła, że są one prawidłowo zablokowane.

Aby odblokować koło, należy pociągnąć dźwignię do jej górnego położenia.

Regulacja podpórki łydek:

Nacisnąć przyciski po zewnętrznych stronach zawiasów podpórki (zdj. 3), ustawić ją pod żądanym kątem i puścić przyciski. Delikatnie nacisnąć podpórkę, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowana. Usłyszą Państwo kliknięcie. Podczas podnoszenia podpórki łydek, pozycja jest regulowana bez naciskania przycisków po zewnętrznych stronach zawiasów.

Nachylenie oparcia:

Możliwe jest ustawienie 6 pozycji oparcia (zdj. 1).

Chwycić blokadę pochylenia oparcia (zdj. 7), pociągnąć mechanizm regulacji w górę i odchylić oparcie do żądanej pozycji. Zwolnić blokadę, następnie nacisnąć na oparcie, aby upewnić się, że oparcie jest zabezpieczone (nie można go odchylić).

Wyposażenie standardowe

Pas pięciopunktowy:

Zwolnić wszystkie plastikowe klamerki, umieścić dziecko w wózku i wyregulować pożądaną długość pasa. Zapiąć pas i pociągając za niego, upewnić się, że jest dobrze zamocowany.

Regulacja długości - Umieścić dziecko w wózku. W zależności od wysokości ramion dziecka, przeciągnąć pasy naramienne przez otwór w tapicerce (zdj. 11), przełożyć pasy pod tapicerką aż do otworu w oparciu i przełożyć pas naramienny przez ten otwór (zdj. 12).

Koszyk:

Mocowanie za pomocą zatrasków do ramy.

Wyposażenie opcjonalne:

Reduktor

Pokrowiec przeciwdeszczowy

Zestaw Flexi-pads - podkładki boczne do regulacji szerokości siedziska

Daszek Classic

Regulowany zagłówek

Letnia osłona nóg

Ten produkt może być opcjonalnie dostarczony z bardzo szeroką gamą akcesoriów mocujących i pozycjonujących. Proszę znaleźć instrukcję obsługi opcjonalnych akcesoriów w oddzielnej broszurze.

2) Użytkowanie wózka:

Wsiadanie do wózka:

Upewnić się, że hamulec postojowy jest wciśnięty, aby ułatwić dostęp można zdjąć podnóżek; jeśli to możliwe oprzeć tył wózka o ścianę lub inny nieruchomy obiekt (inna możliwość to dodatkowa osoba trzymająca wózek nieruchomo); umieścić ostrożnie dziecko w wózku, zapiąć pas bezpieczeństwa i zamontować podnóżek. Dziecko musi zawsze czuć się komfortowo.

Wysiadanie z wózka:

Aktywować hamulec postojowy. W razie potrzeby poprosić zaufaną osobę o pomoc w stabilnym przytrzymaniu wózka. W razie potrzeby, aby ułatwić wysiadanie z wózka, proszę wyregulować pozycję podnóżka. Zdjąć wszystkie zastosowane akcesoria mocujące i pozycjonujące. Zdjąć barierkę zabezpieczającą i ostrożnie wyjąć dziecko z wózka.

Pokonywanie krawężników i niskich przeszkód:

W dół - Ustawić przednie koła na brzegu krawężnika, trzymać mocno uchwyt do pchania wózka, nachylić wózek do tyłu i utrzymać równowagę na tylnych kołach, przysunąć tylne koła na brzeg krawężnika i powoli zjechać tylnymi kołami z krawężnika.

W górę - Ustawić przednie koła przy krawężniku. W żadnym wypadku nie należy objąć przednich kół o krawężnik. Trzymać mocno uchwyt do pchania wózka, nachylić wózek do tyłu i utrzymać równowagę na tylnych kołach. Podjechać do przodu i umieścić przednie koła na krawężniku. Ustawić tylne koła przy krawężniku a następnie wjechać na chodnik.

Jazda wózkiem:

- Używać podjazdów i wind kiedy są dostępne

- Jeśli to tylko możliwe unikać wjeżdżania po schodach, jeśli nie ma innej możliwości zapewnić sobie pomoc przynajmniej jednej osoby.

- Nie próbować wnosić lub znosić wózka po schodach, chyba że Pan/Pani i Pana/Pani pomocnik są pewni, że Pan/Pani mają Państwo kontrolę nad wózkiem i są w stanie udźwignąć ciężar wózka i osoby w nim przebywającej.

- Odpoczywać w regularnych odstępach czasu, jeśli są Państwo zmęczeni.

- Ręce pasażera muszą znajdować się wewnątrz fotelika podczas jazdy.

- NIGDY nie podnosić wózka trzymając za barierkę zabezpieczającą lub podnóżek!

Schodzenie ze schodów:

Mocno trzymać uchwyt do pchania i ustawić wózek przednimi kołami do górnej krawędzi schodów. Przechylić uchwyt do tyłu i popchnąć wózek do przodu, aż tylne koła znajdą się na końcu górnego stopnia. Osoba pomagająca stoi z przodu, trzymając wózek za przednią ramę. Należy podnieść wózek przez obie osoby jednocześnie. Znieść wózek po schodach. Kontynuować stopień po stopniu do dolnej powierzchni.

Wchodzenie po schodach:

Mocno trzymać uchwyt do pchania i ustawić wózek tylnymi kołami do dolnego stopnia schodów. Przechylić uchwyt do tyłu i popchnąć wózek do przodu, aż tylne koła znajdą się na końcu dolnego stopnia. Osoba pomagająca stoi z przodu, trzymając wózek za przednią ramę. Należy podnieść wózek przez obie osoby jednocześnie. Wnieść wózek na górę. Kontynuować stopień po stopniu do górnej powierzchni.

Przenoszenie złożonego wózka:

Wózek należy zawsze przenosić z zabezpieczeniem transportowym. Należy trzymać wyłącznie za ramę główną. Trzymanie za inne części jest niedozwolone!

KONSERWACJA, UTYLIZACJA WYROBU:

- Państwa wózek został zaprojektowany zgodnie z wysokimi standardami i przy prawidłowym użytkowaniu oraz konserwacji zapewni wiele lat bezawaryjnego użytkowania.
- Regularnie sprawdzać elementy blokujące, zaczepty, podnożek, mocowania przegubów, aby upewnić się, że są one bezpieczne i w pełni sprawne.
- Hamulce, koła, opony podlegają zużyciu i powinny być wymienione w razie potrzeby przez warsztat zatwierdzony przez dostawcę wózka.
- Zalecamy, aby wózek był sprawdzany przez autoryzowany serwis co 12 miesięcy.
- Zalecamy, aby po 24 miesiącach odwiedzić dział serwisowy.
- Jeśli wózek jest uszkodzony lub wymaga naprawy, autoryzowany warsztat będzie w stanie doradzić, co jest wymagane.
- Alternatywnie, dział obsługi klienta PATRON Bohemia a.s. jest do Państwa dyspozycji w celu uzyskania informacji o wózku.
- W tym wózku należy stosować wyłącznie części zamienne PATRON Bohemia a.s.
- Jeśli części Państwa wózka staną się sztywne lub trudne w obsłudze (lub nie później niż co 6 miesięcy), należy upewnić się, że przyczyną nie jest brud, nałożyć lekką warstwę smaru w sprayu, np. WD 40 (nie używać oleju ani tłuszczu). Proszę upewnić się, że środek smary wniknął pomiędzy komponenty, ale nie rozpylać go zbyt dużo, ponieważ może to sprzyjać gromadzeniu się brudu. Proszę wytrzeć wszelkie pozostałości smaru. Regularne smarowanie ruchomych części wydłuży żywotność wózka i ułatwi jego rozkładanie i składanie.
- Należy upewnić się, że są Państwo zaznajomieni z obsługą wózka. Wózek powinien zawsze łatwo się rozkładać i składać. Jeśli tak nie jest, proszę nie forsować mechanizmu - proszę przestać i przeczytać instrukcję.
- Koła, części plastikowe i metalowe można czyścić gąbką z ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
- Tkaninę fotelika można prać ręcznie (maks. 30°C).
- Nigdy nie czyścić środkami ściernymi, na bazie amoniaku, wybielaczami i środkami czyszczącymi na bazie alkoholu.
- Po wystawieniu na działanie wilgoci, proszę wytrzeć wózek miękką szmatką i pozostawić w pełni rozłożony w ciepłym i suchym miejscu.
- Przechowywać wózek w suchym, bezpiecznym miejscu.
- Należy regularnie sprawdzać i dokręcać złącza śrubowe.
- Jeśli używane są linki sterowania (hamulce, teleskopy, pochylenie), należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby ustawić i naoliwić.

Żywotność produktu: Przewidywany okres użytkowania produktu wynosi 5 lat. Przewidywany okres użytkowania produktu został wykorzystany jako podstawa do opracowania produktu i określenia wymagań dotyczących użytkowania produktu w danym celu. Dane te obejmują również wymagania dotyczące konserwacji w celu zapewnienia wymaganej skuteczności i bezpieczeństwa wyrobu.

Informacje dotyczące utylizacji: W celu utylizacji, wyrób należy zutylizować zgodnie z lokalnymi obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w kraju, w którym wyrób był używany.



WARUNKI GWARANCJI:

1. Wyrób jest objęty 24 miesięczną gwarancją liczoną od dnia zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i technologiczne.
2. Wyrób może być używany tylko i wyłącznie do celu w jakim został zaprojektowany, instrukcja użytkowania musi być przestrzegana.
3. Wyrób musi być właściwie używany, konserwowany i przechowywany zgodnie z instrukcją użytkowania.
4. Nie ściągać etykiety identyfikacyjnej. Musi ona być czytelna i nieuszkodzona przez cały okres gwarancji.
5. Zgłoszenia gwarancyjne należy dokonać u sprzedawcy, u którego wyrób został zakupiony. Prawidłowo wypełniona "Karta gwarancyjna" oraz dowód zakupu muszą zostać dołączone do zgłoszenia gwarancyjnego. Każdą wadę należy zgłosić natychmiastowo.
6. Procedura reklamacyjna może być rozpoczęta kiedy wózek zostanie dostarczony w całości i w oryginalnym opakowaniu, zapakowany starannie i zabezpieczony od uszkodzeń. Właściciel jest zobowiązany do dostarczenia wózka wyczyszczonego, wymytego i w zgodzie z podstawowymi zasadami higieny. Podstawowa konserwacja i czyszczenie nie może być wymagane w zgłoszeniu gwarancyjnym.
7. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem wózka, użyciem siły, nieuprawnionymi zmianami konstrukcyjnymi wózka lub wyposażenia dodatkowego oraz naturalnego zużywania się części w szczególności zabrudzeń i uszkodzeń tapicerki, zużycia części plastikowych, hamulców, bieżnika opon oraz przebić opon.
8. W przypadku zaistnienia poniższych sytuacji następuje utrata gwarancji: użytkownik nie stosuje się do zasad użytkowania, konserwacji i przechowywania wymienionych w instrukcji użytkowania lub kiedy produkt jest serwisowany przez jednostki inne niż autoryzowane centra serwisowe lub kiedy naklejka identyfikacyjna nie jest umieszczona na wózku i jednocześnie na karcie gwarancyjnej.
9. Okres gwarancji nie jest równy okresowi użytkowania to oznacza, że wózek prawidłowo użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i właściwie konserwowany może służyć znacznie dłużej niż wynosi okres gwarancji.
10. Ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty i obrażenia spowodowane użytkowaniem wyrobu niezgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji użytkowania".

Producent, PATRON Bohemia a.s., zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.

NOTATKI:

UCZESTNIK ŁAŃCUCHA DYSTRYBUCJI / SCHEMAT IDENTYFIKACYJNY

 <p>PATRON Bohemia a.s. Českolipská 3419, Mělník, CZ (www.patron.eu)</p>	<p>Etykieta identyfikacyjna produktu:</p>
<p>Producent - kontrola końcowa produktu / nazwa:</p> <p>Podpis:</p>	
<p><u>Importer / dystrybutor w UE :</u> (nazwa, adres, dane kontaktowe)</p>  <p>Wyłączny dystrybutor w Polsce: MOBILEX Sp. z o.o. ul. Duńska 3/5, Łódź tel.: 42 214 29 11; fax.: 42 214 14 05 www.mobilex.pl ; info@mobilex.pl</p>	<p>Importer / dystrybutor w UE (pieczętka):</p>
<p><u>Punkt sprzedaży / Partner serwisowy :</u> (nazwa, adres, dane kontaktowe)</p>	<p>Punkt sprzedaży / Partner serwisowy (pieczętka):</p>
<p>Data zakupu (dzień, miesiąc, rok): _____ Nazwa (drukowanymi literami), numer telefonu, pieczętka i podpis sprzedawcy: _____</p> <p>_____ . _____ . _____</p>	