



Dane Techniczne:

<b>PARAMETR:</b>	<b>Model AR-004</b>
Rama:	Stalowa
Regulacja wysokości uchwytów:	82-98 cm
Koła:	Średnica 8" (20 cm), pełne, bezobsługowe
Waga:	8,3 kg
Maksymalna waga użytkownika	110 kg
Wyposażenie standardowe:	Hamulec z funkcją postojową, zdejmowany koszyk z pokrywą, torba na zakupy zapinana na suwak

<b>SYMBOLE:</b>								
								
Wyrób medyczny	Zapoznaj się z instrukcją	Producent	Wyrób spełnia wymagania UE	Ostrzeżenie	Nr dato / serii	Data produkcji m-c/rok	Nadaje się do recyklingu	Selektywna zbiórka odpadów

**KARTA GWARANCYJNA**

Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

<b>Data sprzedaży</b>	<b>Pieczęć i podpis sprzedawcy</b>	
<b>Nr faktury zakupu</b>		
<b>Nr LOT</b>	<b>Okres gwarancji</b>	.....
<b>Balkonik trójkołowy z torbą i koszykiem Model: AR-004</b>	<b>Czy wyrób zostaje wprowadzony do systemu refundacji ze środków publicznych?</b>	<b>*niewłaściwe skreślić TAK / NIE*</b>
	<b>Numer ewidencyjny zlecenia</b>	
	.....	

- Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym zwyczajowo 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu refundacji ze środków publicznych producent udziela 30 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
- ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
- W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji, elementów plastikowych i gumowych (tj. ścieranie się kół, uchwytów z tworzywa/pianki)
- Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania podpórki niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta (dot. konstrukcji balkonika, tacy oraz torby na zakupy)
- Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
- Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.**
- Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta. **Reklamowany wyrób musi być w należyłym stanie higienicznym.**



**INSTRUKCJA OBSŁUGI  
KARTA GWARANCYJNA**

**BALKONIK TRÓJKOŁOWY  
Z TORBĄ I KOSZYKIEM**

**Model: AR-004**



**ARMEDICAL Sp. z o.o.**  
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska  
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111  
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl





## INSTRUKCJA OBSŁUGI - BALKONIK TRÓJKOŁOWY Z TORBĄ I KOSZYKIEM

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie którym nas obdarzyliście. Dolażyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie produktem znacznie ułatwiającym Państwu poruszanie się w domu jak również w codziennych spacerach. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

### Przeznaczenie wyrobu:

Balkonik jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.



### Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na balkoniku, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

### Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z balonika – **110 kg**

Maksymalne dopuszczalne obciążenie koszyka z pokrywą oraz torby na zakupy – **5 kg**



### Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy wszystkie elementy ramy (8) są proste, nie nadłamane (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy obydwie ręczki balkonika (1) ustawione są na tej samej wysokości
3. Sprawdzenie czy zaciski śrubowe (5) są mocno „zaciśnięte” uniemożliwiając wyjęcie rączek do pchania (1)
4. Sprawdzenie czy balkonik posiada wszystkie trzy koła (9) i (10)
5. Sprawdzenie czy koła są solidnie przykręcone (9) i (10)
6. Sprawdzenie czy wszystkie elementy ramy balkonika są stabilnie ze sobą połączone (8)
7. Sprawdzenie czy belka poprzeczna jest całkowicie rozłożona (7) z wkręconą śrubą blokującą
8. Nie rozkładać / używać balkonika w miejscach, gdzie może być ślisko (rozlana ciecz, lód)



### W celu uniknięcia urazów:

1. Balkonik powinien być całkowicie rozłożony (śruba w belce poprzecznej (7) musi być solidnie dokręcona)
2. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stabilności balkonika przed użyciem
3. Uchwyty (rączki do pchania) (1) muszą być ustawione na tej samej wysokości
4. Używać balkonika tylko na płaskim, twardym podłożu. Nie używać na schodach!
5. Zachować szczególną ostrożność na mokrej, śliskiej powierzchni. Balkonik używać wyłącznie idąc do przodu.
6. Przy poruszaniu się należy szczególnie uważać na leżące dywaniki, części garderoby, zabawki itp., jak również leżące zwierzęta, nierówne, popękane powierzchnie, nierówności chodników, krawężniki itp.
7. Każdorazowo balkonik musi być trzymany oburącz! Dłonie stabilnie obejmujące uchwyty (1), możliwość szybkiego pociągnięcia za uchwyty hamulca (2).
8. Balkonik nie może być narażony na długotrwałe działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych (np. bardzo silny mróz lub bezpośrednie silne działanie promieni słonecznych)
9. Nie wolno przeciążać balkonika, przekraczać maksymalnego obciążenia dopuszczalnego przez producenta.
10. Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia koszyka z pokrywą (3)
11. Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia torby zamykanej na suwak (4)
12. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

### Sposób konserwacji:

Balkonik należy czyścić regularnie używając tylko i wyłącznie wody i łagodnych detergentów. Balkonik należy wytrzeć / osuszyć delikatną szmatką. Nie wolno używać środków ściernych! Linki hamulcowe, elementy (koła, rączki) są elementami zużywalnymi i muszą być wymieniane na nowe w sytuacji stwierdzenia ich nadmiernego zużycia. Wyżej wymienione elementy nie podlegają gwarancji. Ewentualne luzy na połączeniach śrubowych oraz regulacje hamulców spoczywają na użytkowniku i nie stanowią podstawy do reklamacji.

### Harmonogram konserwacji:

**Co tydzień** Sprawdź hamulec pod kątem awarii, sprawdź wszystkie koła pod kątem poluzowanych śrub, nakrętek i osi.

**Cyklicznie** Sprawdź uchwyty pod kątem zużycia, sprawdź, czy śruby ramy są dokręcone, sprawdź, czy śruba przedniej i tylnej osi są dokręcone, sprawdź „zmęczenie” elementów pod kątem zużycia lub pęknięć.

### Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie balkonika jest ZABRONIONE!!! Grozi to wypadkiem.

#### I. Balkonik jest nie stabilny.

- a. Czy obydwie rączki balkonika (1) są na tej samej wysokości? Jeśli nie, należy je prawidłowo ustawić.
- b. Czy zaciski śrubowe (5) są solidnie zaciśnięte? Jeśli nie, należy je zaciśnąć.
- c. Czy belka poprzeczna (7) jest całkowicie rozłożona z solidnie przykręconą śrubą? Jeśli nie, należy ją rozłożyć i skrócić śrubą blokującą.
- d. Czy wszystkie koła są solidnie dokręcone? Jeśli nie, należy dobrze je dokręcić.
- e. Czy wszystkie elementy ramy balkonika (5) są solidne ze sobą połączone? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. NIE WOLNO UŻYWAĆ BALKONIKA!!!

### Incydenty

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

### Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

### Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać używać wyrób.

## ELEMENTY SKŁADOWE / UŻYTKOWE



1. Uchwyty, rączki do pchania
2. Hamulec ręczny z blokadą postojową
3. Koszyk z pokrywą
4. Torba zamykana na suwak
5. Zacisk śrubowy
6. Linki hamulców
7. Belka poprzeczna składanie/rozkładanie
8. Rama stalowa
9. Koło przednie skrętne
10. Koła tylne z hamulcem dociskowym
11. Rurki uchwytów

### Przygotowanie do użycia

1. Wyjąć balkonik z opakowania kartonowego lub foliowego.
2. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny balkonika zgodnie z pkt. **Uwagi i ostrzeżenia**.
3. Uchwyty, rączki do pchania (1) włożyć w otwory znajdujące się w ramie (8). Patrzeć na rys. wyżej.
4. Chwycić oburącz za uchwyty, rączki do pchania (1) i przesunąć na zewnątrz aż do całkowitego rozłożenia balkonika. Dokręcić solidnie śrubę w belce poprzecznej (7)
5. Należy dopasować wysokość balkonika, rączek do pchania (1) do wzrostu użytkownika, w tym celu należy wykręcić zacisk śrubowy (5) znajdującego się w ramie (8), wyjmując całkowicie śrubę. Ustawić poprzez rozsuwanie lub zsuwanie wymaganą wysokość. Ponownie włożyć śrubę w istniejący otwór w ramie, dokręcić i zaciśnąć zaciskiem śrubowym (5) Czynność powtórzyć dla obydwu rączek balkonika. Rączki do pchania (1) muszą znajdować się na tej samej wysokości.
6. Po rozłożeniu należy bezwzględnie sprawdzić poprawność działania hamulców. Należy położyć dłoń na uchwytach (1), palcami podciągnąć rączki hamulców ku górze (2) a następnie sprawdzić czy dociski blokują tylne koła. Dodatkowo po przeprowadzonym teście uchwytów hamulców (2) należy pchnąć palcami maksymalnie ku dołowi do momentu „kliknięcia” zatrasku. Hamulec powinien znajdować się w pozycji postojowej a następnie sprawdzić popychając lekko balkonik do przodu czy koła są zablokowane.
7. Założyć koszyk z pokrywą (3) na istniejące haczyki w części przedniej balkonika. Patrzeć na rys. wyżej.

**Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.**

### Zakończenie użytkowania:

1. Unieść koszyk z pokrywą ku górze (3), tym samym zdejmując go z uchwytów mocujących.
2. Złóż balkonik składając belkę poprzeczną po wcześniejszym poluzowaniu śruby blokującej, a następnie przesunąć do środka uchwyty (1), nastąpi złożenie balkonika.

### Czyszczenie i przechowywanie:

1. Postaw balkonik w miejscu gdzie nie będzie narażony na uszkodzenia mechaniczne.
2. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

**DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU**