



INSTRUKCJA OBSŁUGI – KARTA GWARANCYJNA AR-602 Orteza stopowo-goleniowa, wysoka. Walker Pro

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście. Dodażyliśmy wszelkich starań aby nasz wyrób spełniał Państwa oczekiwania. Mamy nadzieję, że znacznie przyczyni się do poprawy komfortu oraz prawidłowego procesu leczenia pooperacyjnego i zachowawczego urazów stopy i stawu skokowego. Będzie produktem znacznie ułatwiającym życie codzienne pomimo procesu leczenia kontuzji/urazu. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Możliwość zastosowania wyrobu bezwzględnie należy skonsultować z lekarzem specjalistą. Poprawna aplikacja jest niezbędna dla Twojego bezpieczeństwa i pełnej funkcjonalności produktu.

Zastosowanie wyrobu: Orteza stopowo-goleniowa **Walker Pro** przeznaczona jest dla osób z urazami stopy oraz stawu skokowego.

Zapewnia ochronę i stabilizację w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, skręceń 2 i 3 stopnia, pęknięć kości, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia. Znajduje również zastosowanie w przypadku naciągnięcia lub naderwania ścięgna Achillesa oraz w celu zapewnienia stabilizacji pooperacyjnej. Stanowi doskonałą alternatywę do tradycyjnego unieruchomienia gipsowego, zdecydowanie poprawiając komfort użytkownika. Dzięki zintegrowanej pompce gwarantuje dostosowanie kompresji do stanu chorobowego pacjenta redukując możliwość wystąpienia krwiaków oraz obrzęków. Gwarantuje możliwość regularnej oceny wizualnej kontuzji oraz utrzymanie kończyny w należytym stanie higienicznym. Dzięki ultra lekkiej konstrukcji **Walker Pro** nie obciąża kończyny, a zastosowana miękka wyściółka pneumatyczna gwarantuje wysoki komfort użytkownika. Sposób zakładania na odwrócie niniejszej instrukcji.

Właściwości wyrobu: Konstrukcja panelowa wykonana z ultra-lekkiego tworzywa, dopinany panel przedni zwiększa komfort zakładania oraz użytkownika. Panele z wyciętymi otworami gwarantującymi prawidłową cyrkulację powietrza. Profilowane, komfortowe krawędzie boczne w celu redukcji ucisku na łydkę. Wyposażona w system pasów obwodowych w celu indywidualnego dopasowania siły stabilizacji. Wyściółka pneumatyczna wykonana z delikatnego materiału, zapobiegającego otarciom, wyposażona w zintegrowaną pompkę. Podeszwa anty-poślizgowa o specjalnie zaprojektowanym kształcie wspomagającym w naturalnym i stabilnym chodzie. Podeszwa wyposażona w poduszkę powietrzną „na pięcie” pochłaniającą energię, w celu zmniejszenia wstrząsów i większego komfortu użytkownika.

W zestawie indywidualnie regulowana osłona palców.

Parametry techniczne: Waga: od 1100g w zależności od rozmiaru Kolor: szaro-czarny Uniwersalna na prawą i lewą nogę.

Przeciwwskazania i zalecenia: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odgniecenia, odparzenia, zmiany troficzne, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych lub niestabilnych złamań. Nie stosować ortęzy po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Osoby z zaburzeniami czucia oraz diabetycy muszą być regularnie monitorowane przez lekarza specjalistę w trakcie użytkowania ortęzy. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

Uwagi i ostrzeżenia: W celu uniknięcia wypadku należy zachować szczególną ostrożność przy przemieszczaniu się po mokrych lub śliskich powierzchniach. Wyrób musi być prawidłowo założony tzn. wszystkie pasy obwodowe solidnie dopięte, komory powietrzne prawidłowo napompowane aby gwarantować prawidłową stabilizację kończyny - użytkowanie rozpiętej ortęzy grozi wypadkiem!

W przypadku wystąpienia odrętwienia lub objawów bólowych w obrębie działania ortęzy należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą. Nie wolno nadmiernie pompować komór powietrznych, może to doprowadzić do występowania krwiaków, obrzęków, bólu zbyt mocno uciśniętej kończyny. Należy kontrolować zmiany skórne, w przypadku ich wystąpienia należy zmniejszyć poziom powietrza w komorach. Aby wyrób spełniał prawidłowo swoją funkcję musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru. Czas stosowania produktu jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza specjalistę, rehabilitanta lub fizjoterapeutę.

Przygotowanie do użycia: Wyjąć ortęzę z opakowania. Postępować zgodnie z instrukcją użycia rysunkowo-opisową (na odwrócie) niniejszej instrukcji.

Zakończenie użytkowania: Po zakończeniu użytkowania należy wypuścić powietrze z wyściółki pneumatycznej, zapiąć w prawidłowych pozycjach pasy obwodowe. Ortęzę należy przechowywać w suchym miejscu z dala od ognia oraz ostrych przedmiotów. Nie należy pozostawiać ortęzy w dużym nasłonecznieniu (szczególnie napompowanej), wzrost temperatury powietrza w środku (a tym samym ciśnienia) może doprowadzić do rozerwania wyściółki pneumatycznej.

Sposób konserwacji: Wyściółkę należy czyścić gąbką delikatnie zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu np. mydła, unikając nadmiernego przemoczenia. Pamiętać aby dobrze spłukać, ponieważ pozostałości mydła mogą powodować podrażnienia skóry. Nie chlorować, nie prać chemicznie, nie wykręcać, nie szorować. Suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła, nie suszyć suszarką. Suszyć w postaci rozłożonej. Nie prasować. Korpus czyścić wilgotną ściereczką.

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

KARTA GWARANCYJNA:

Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy
Nr zlecenia NFZ	
Nr partii	

- Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75, udziela niniejszym zwyczajowo 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu refundacji ze środków publicznych producent udziela 18 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
- ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
- W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezwzględnie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych, tj. np. siłowe przekreślenie zaworu, przecięcie materiału wyściółki oraz taśm obwodowych lub uszkodzenie ortęzy na skutek jej upadku z wysokości, kopnięcia w twardą przeszkodę. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji tj. zarysowań, zadrapań, wycierania się podeszwy.
- Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania ortęzy niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także nie stosowanie się do punktu „sposób konserwacji”. Zbytne zawilgocenie i pozostawienie w wilgotnym pomieszczeniu może doprowadzić to zapleśnienia materiału.
- Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
- Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.
- Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.

SYMBOLY:



Wyrób medyczny Zapoznaj się z instrukcją Producent Wyrób spełnia wymagania UE Ostrzeżenie Nr daty / serii Data produkcji m-c/rok Nadaje się do recyklingu Selektywna zbiórka odpadów





ARMEDICAL Sp. z o.o.


al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl




Instrukcja zakładania

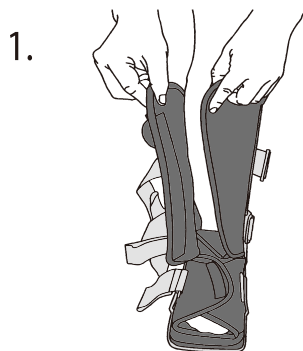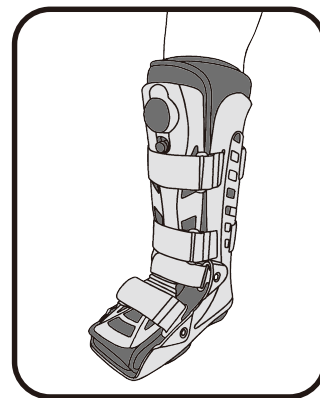


Otwórz wyściółkę poprzez rozpięcie rzepów i zdjęcie panelu przedniego. Włóż dołączone podkładki do wyściółki lub między wyściółkę a "skorupę" aby uzyskać lepsze dopasowanie anatomiczne. Umieść stopę i nogę w orciezie. Owiń, zapnij wyściółkę.

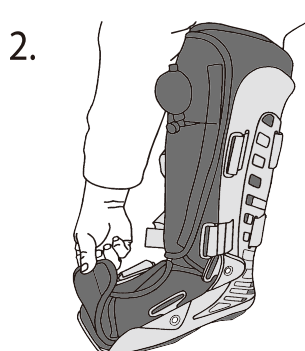

W razie potrzeby przypnij rzepami osłonę palców do wyściółki

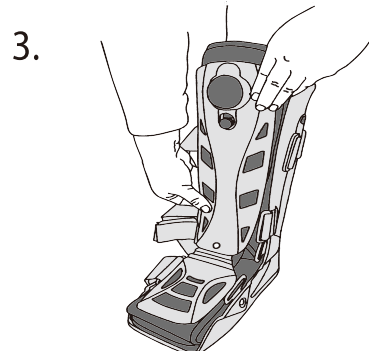

Umieść panel przedni nad kostką. Upewnij się, że pompka i zawór pokrywają się z otworami w panelu.

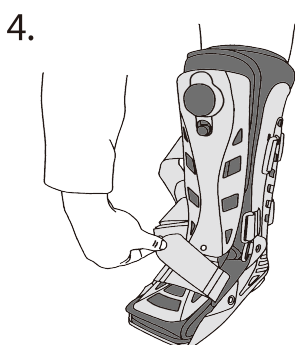

Przełóż pasy obwodowe przez podłużne otwory i zapnij JE.




Zapnij pasy stopy, kostki i łydki. Dopnij pasy, aż będą wygodnie dopasowane.




Po właściwym dopasowaniu i zapięciu możesz używać orciezy.



Pompuj uciskając palcami.

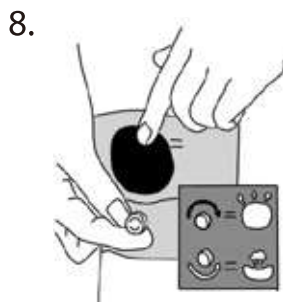

W prawo
Gotowy do pompowania
 W lewo
Otwarty - wypuszczanie powietrza

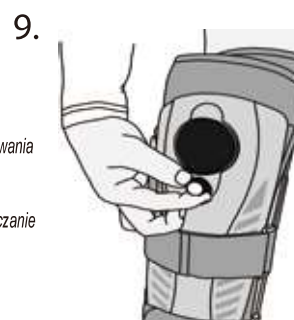

Zawór przekręcamy do delikatnego oporu! NIE przekręcić!!!

7-8-9. Używanie zaworu powietrznego: Upewnij się, że okrągły zawór jest zamknięty, obracaj zawór zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie zamknięty. Pompuj pompką uciskając palcami, aż poczujesz ciśnienie w wyściółce pneumatycznej. W celu wypuszczenia powietrza, obróć okrągły zawór przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i odczekaj 15 sekund, aż powietrze zostanie uwolnione.

UWAGA PRZECZYTAJ - Ostrzeżenie!!!

Ten wyrób jest przeznaczony do użytku wyłącznie pod nadzorem lekarza. Jeśli podczas korzystania z orciezy wystąpi jakiegokolwiek ból, obrzęk, zmiany skórne, zmiany czucia lub jakiejkolwiek nietypowe objawy, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.