

Doorstep Ramps

(Rampy progowe)



Instrukcja użytkowania

1 Doorstep Ramps Informacje ogólne

Szanowny Kliencie,

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis wyrobu medycznego i ważnych wytycznych w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu. Przed pierwszym użyciem naszego produktu prosimy o przeczytanie i dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji oraz przestrzeganiem wszystkich naszych zaleceń.

Rehasense stale doskonali swoje produkty i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji produktu bez uprzedniego ostrzeżenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z producentem. Informacje kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.

2 Doorstep Ramps Wskaz. i stosowanie wyrobu zg. z przeznaczeniem

Rampy "Doorstep Ramps" są wyrobami medycznym wspomagającym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, skuterach lub z wykorzystaniem chodzików. Umożliwiają one pokonywanie niewielkich przeszkód takich, jak np.: progi w drzwiach, krawężniki, pojedyncze stopnie, niewielkie różnice poziomów między pomieszczeniami itp. z pomocą lub bez pomocy osoby asystującej.

Mogą być użytkowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jakiegokolwiek inne zastosowanie ramp jest zabronione.

3 Doorstep Ramps Zasady bezpieczeństwa

Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji przed pierwszym użyciem produktu. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i wypadki wynikłe z nieprawidłowego użytkowania.



Ograniczenia w zastosowaniu produktu

- Zabrania się użytkowania uszkodzonej rampy
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
- Należy zapoznać się z oznaczeniami znajdującymi się na produkcie.
- Każda osoba użytkująca produkt winna jest zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi w celu wyeliminowania nieprawidłowości w sposobie jej użycia. Jakiegokolwiek uszkodzenia produktu powstałe w wyniku nieodpowiedniego i niezgodnego z instrukcją użytkowania produktu nie będą objęte gwarancją producenta
- Nie należy obciążać ramp ciężarem większym niż dopuszczalnym (podanym na etykiecie produktu)
- Należy stosować się do zaleceń instrukcji dotyczącej wysokości wzniesień i stopni, podanych w danych technicznych na str. 4. Nie należy przekraczać podanych wartości.
- Należy użytkować rampy tylko do celów do których zostały wyprodukowane

- Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w konstrukcji produktu, chyba, że posiadają Państwo pisemną zgodę producenta
- Należy stosować tylko na stabilnych powierzchniach



Proszę zachować szczególną ostrożność. Palce, bądź inne części ciała mogą być przycięte podczas składania, rozkładania lub regulacji urządzenia. Zwracaj uwagę na wszystkie szeliny i otwory w konstrukcji urządzenia.

4 Doorstep Ramps.....Dostawa i ogólny opis produktu

Rampy wykonane są z aluminium uformowanego w ryflowany kształt, w celu zwiększenia ich wytrzymałości i elastyczności. Są odporne na korozję.

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić:


Rampy są złożone i dostarczane w opakowaniach kartonowych. Opakowanie (w zależności od wybranego typu) zawiera:

- typ 771002: 1 składana rampa, 1 instrukcja użytkowania;
- typ 771003: 2 małe składane rampy, 1 torba na rampy, 1 instrukcja użytkowania;;
- typ 771004: 1 rampa, 3 nóżki z reg. wysokości, 1 instrukcja użytkowania.

Należy w pierwszej kolejności wyjąć wyrób z opakowania i sprawdzić zgodnie z zawartym opisem czy zawiera wszystkie elementy. W przypadku jakichkolwiek niezgodności bądź brakujących elementów nie należy kontynuować procesu montażu, lecz skontaktować się ze sprzedawcą.

5 Doorstep Ramps.....Używanie wyrobu


Typ 771002 (DS4076)

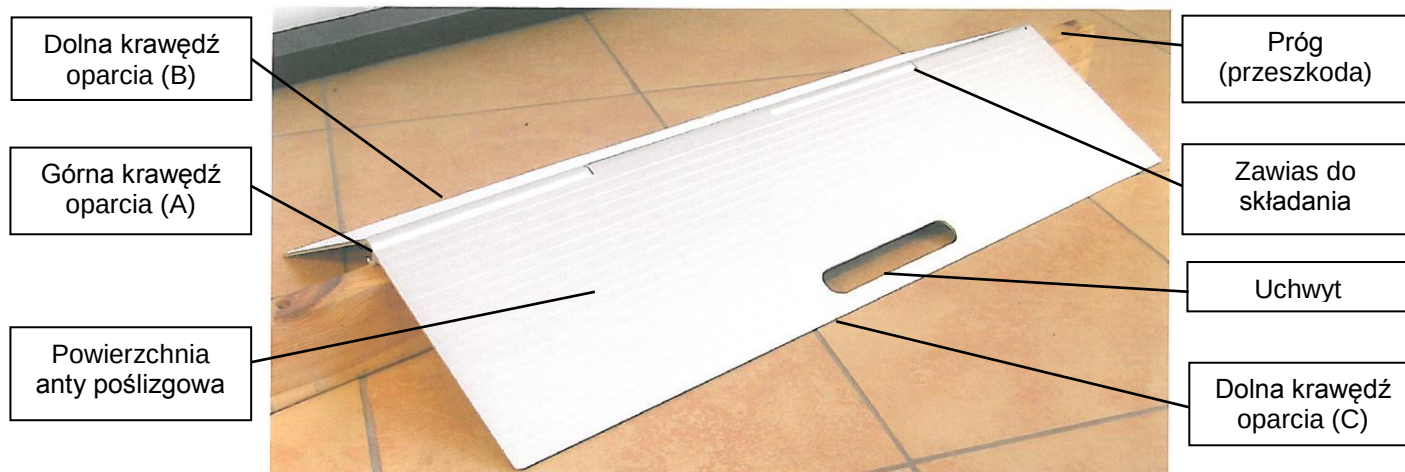

Zalecamy następujące kroki postępowania:

- Pociągnij krawędzie rampy na boki, aby ją otworzyć.
- Rampa ma 3 krawędzie oparcia (pozycjonujące): 1 krawędź górną (A) na środku and 2 krawędzie dolne (B & C) na bokach. Wszystkie 3 krawędzie muszą być zawsze stabilnie oparte podczas używania.
- Krawędź górna (A) musi zawsze znajdować się na szczycie pokonywanej przeszkody
- Krawędzie dolne (B & C) musi zawsze znajdować się w najniższym punkcie poniżej przeszkody.
- Rampa musi być posadowiona na stabilnej powierzchni.
- Przed użyciem, prosimy o upewnienie się, że rampa jest umiejscowiona stabilnie
- Po użyciu elementy składane rampy zamykamy podobnie jak książkę.
- Korzystaj z wyciętych uchwytów, aby łatwo przenosić rampę.


Typ 771003 (DS4025)

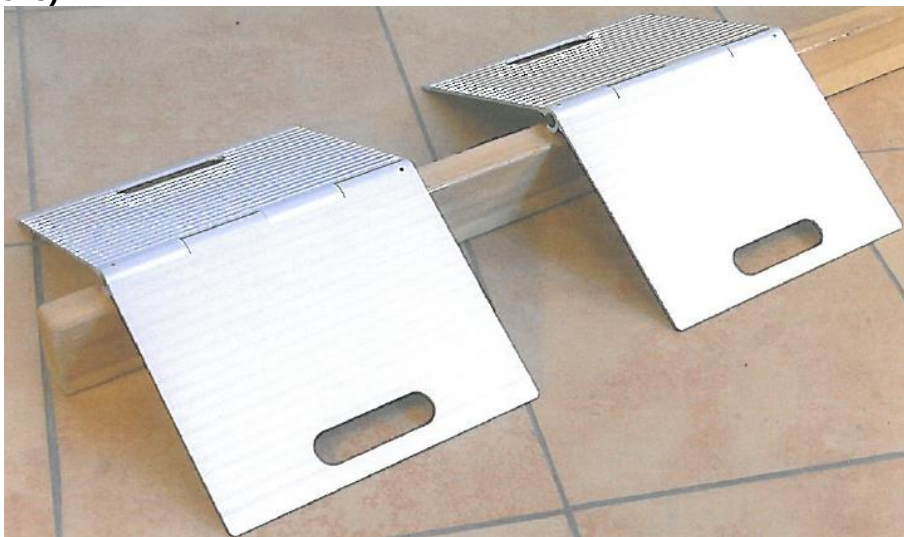

Ten typ działa tak samo, jak opisany wcześniej 771002. Jedyną różnicą jest to, że ten typ składa się z dwóch mniejszych ramp zamiast jednej, dłuższej. Ma to na celu ograniczenie gabarytów i wagi rampy dla osób, które dużo podróżują. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dla typu 771002 z uwzględnieniem 2 dodatkowych uwag:

- Jako, że Twoja rampa składa się z 2 oddzielnych elementów pamiętaj, że muszą one być zawsze ułożone równolegle do siebie, a dystans między nimi musi być dopasowany do rozstawu kół Twojego wózka inwalidzkiego lub chodzika.
- Ten typ rampy nie nadaje się do używania z pomocami 3 kołowymi, takimi jak np: 3 kołowe skutery lub 3 kołowe chodziki.

Typ 771004 (DS2176)

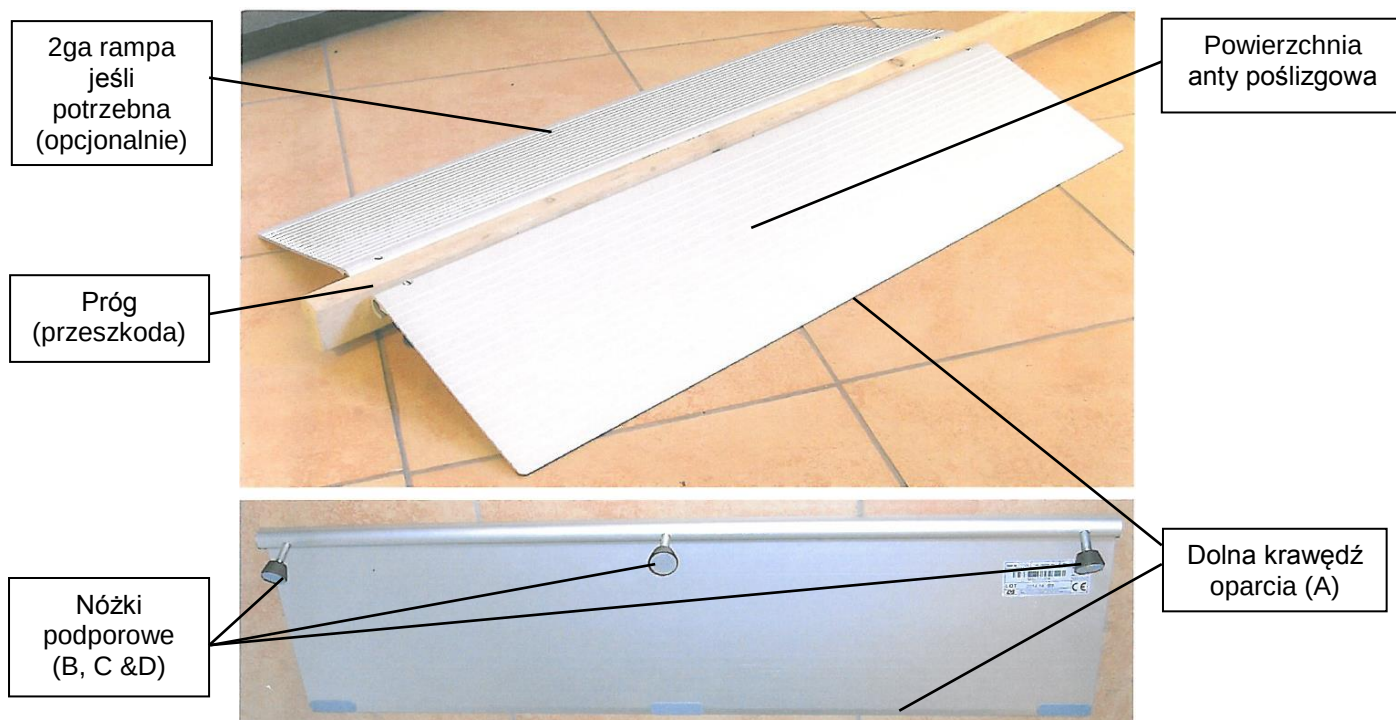

Zalecamy następujące kroki postępowania:

- Aby pokonywać pojedyncze schodki lub różnice poziomów między pomieszczeniami wystarczy użyć jednej rampy (po niższej stronie przeszkody). Aby pokonywać progi w drzwiach itp. (jak pokazano na zdjęciu powyżej) należy nabyć 2 rampy typu 771004.

- Rampa ma 4 punkty podparcia: 1 krawędź dolną (A) and 3 regulowane na wysokość nóżki (B, C & D). Wszystkie 4 punkty muszą być zawsze stabilnie oparte podczas używania
- Wsuń 3 nóżki w 3 dedykowane im otwory przy górnej krawędzi rampy, jak pokazano na zdjęciu powyżej.
- Obracaj każdą nóżkę zgodnie z ruchem zegara, aby zmniejszyć wysokość rampy. Obracaj każdą nóżkę przeciwnie do ruchu zegara, aby zwiększyć wysokość rampy. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej, dopuszczalnej wysokości rampy (7 cm).
- Wszystkie 3 nóżki muszą zawsze być ustawione na tę samą wysokość. Zawsze używaj wszystkich 3 nóżek, aby stabilnie podeprzeć rampę.
- Krawędź górna musi zawsze znajdować się na wysokości szczytu pokonywanej przeszkody.
- Krawędź dolna musi zawsze znajdować się w najniższym punkcie poniżej przeszkody.
- Rampa musi być posadowiona na stabilnej powierzchni.
- Przed użyciem, prosimy o upewnienie się, że rampa jest umiejscowiona stabilnie

6 Doorstep Ramps Transport wyrobu

Rampy mogą być bardzo szybko składane co ułatwia użytkownikom transport. Podczas transportu należy zawsze zabezpieczyć i unieruchomić rampy w celu uniknięcia jakichkolwiek wypadków.

7 Doorstep Ramps Utylizacja

Urządzenie nie powinno być wyrzucane do śmietnika z odpadami komunalnymi Zużyte rampy należy oddawać do utylizacji.

8 Doorstep Ramps Dane Techniczne

Typ	Opis	Wymiary rozłożonej rampy: Dł.xSzer.xWys. (cm)	Wymiary złożonej rampy: Dł.xSzer.xWys. (cm)	Masa (kg)	Dop. obciążenie (kg)	Dop. wys. przeszkody (różnica poziomów) (cm)
771002	Jedna, składana rampa	40x76x2	21x76x2	3,3	350	3-7
771003	2 składane rampy	40x25x2 / 1 rampa	21x25x2 / 1 rampa	1,05 / 1 rampa	175 x 2	3-7
771004	Rampa z 3 nóżkami	21x76x3-7	21x76x2	1,55	350	3-7

9 Doorstep Ramps Etykieta

Etykieta znajduje się na spodzie produktu. Zawiera ona ważne informacje o wyrobie:

- nazwę, datę produkcji, nr seryjny, dop. obciążenie, wymiary, masę własną, dop. wysokość przeszkody, znak CE oraz dane wytwórcy.

10 Doorstep Ramps Pielęgnacja

- Należy regularnie czyścić urządzenie i utrzymywać je w czystości
- Lekkie zanieczyszczenia lub kurz należy przetrzeć zwilżoną szmatką.
- Większe zabrudzenia należy usuwać nieinwazyjnymi środkami chemicznymi, które nie powodują korozji.
- Nie należy stosować silnych detergentów lub wybielaczy.
- Wycierać do sucha delikatnymi ściereczkami.

11 Doorstep Ramps.....**Konserwacja**

Rampy praktycznie nie wymagają konserwacji. Mimo to, zaleca się zawsze przed użytkowaniem sprawdzić czy powierzchnia szyn (bieżnia) jest czysta. W przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak nieprawidłowości należy skontaktować się ze sprzedawcą. Pomimo solidnej konstrukcji zaleca się również okresowe sprawdzanie ich sprawności przez profesjonalistów. Należy sprawdzać wszystkie zabezpieczenia, śruby, zaciski oraz sztywność ramp. Należy natychmiast wymienić wszelkie uszkodzone, zużyte części.

12 Doorstep Ramps.....**Gwarancja**

Producent udziela 2 – letniej gwarancji na produkt. Gwarancja obejmuje wady wynikłe z winy producenta. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia się produktu ani wad powstałych z innego użytkowania produktu niż opisany w instrukcji.