

Instrukcja montażu i użytkowania

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Przenośny Podnośnik Pacjenta

GoLift

Portable450



LeviCare.pl
PRODUCENT SPRZĘTU MEDYCZNEGO

<;:98;76958 **Amico** 43251: 0/

Wprowadzenie	3-4
Symbole użyte w niniejszej instrukcji	4
Oznaczenia	4
Instrukcje bezpieczeństwa	5
Specyfikacje techniczne przenośnego podnośnika Amico GoLift Portable	6
Budowa przenośnego podnośnika GoLift Portable	7
Podstawowe zasady w zakresie przenoszenia pacjenta	8-9
Montaż przenośnego wózka w prowadnicy Amico PLP	9-10
Montaż ogranicznika krańcowego na prowadnicy Amico	10
Korzystanie z drążka Reacher Bar do podwieszania podnośnika	11
Podłączanie pilota ręcznego sterowania obsługiwanego dotykem pojemnościowym do przenośnego podnośnika GoLift Portable	11
Użytkowanie przenośnego podnośnika GoLift Portable	12
Ładowanie przenośnego podnośnika GoLift Portable	12
Funkcje wskaźników LED i sygnalizacji dźwiękowej	13
Zatrzymanie awaryjne	13
Opuszczanie awaryjne	14
Ręczne opuszczanie i podnoszenie awaryjne	14
Hamulec odśrodkowy	14
Czyszczenie i dezynfekcja	15
Rozwiązywanie i usuwanie problemów	15
Przegląd i konserwacja	16
Systemy GoTrack i konstrukcja wspierająca	17
Warunki otoczenia	18
Dane dotyczące zgodności elektromagnetycznej przenośnego podnośnika Amico GoLift Portable	19-22
Gwarancja	23

Wprowadzenie

ZASTOSOWANIE

Podstawowym celem systemu GoLift Portable jest bezpieczne podnoszenie i przenoszenie pacjenta w warunkach szpitalnych lub w domu. System podnośnika przenośnego GoLift Portable umożliwia te transfery przy jak najmniejszym wysiłku opiekuna, zapewniając jednocześnie poszanowanie godności pacjenta. Podnośnik sufitowy jest prosty w obsłudze i bezpieczny zarówno dla opiekuna, jak i dla pacjenta. Opiekun może z łatwością przesuwając urządzenie wzdłuż prowadnic z jednego miejsca do drugiego.

OPIS

Amico GoLift Portable to idealny system podnośników sufitowych przeznaczony do rutynowego przenoszenia pacjentów. Najbardziej kompaktowy przenośny podnośnik sufitowy w swojej klasie, Amico GoLift Portable został zaprojektowany tak, aby był estetyczny zarówno dla opiekuna jak i pacjentów. By spełnić wymagania w zakresie kontroli zakażeń, zwróciliśmy szczególną uwagę na gładkie krawędzie i zaokrąglone narożniki naszego podnośnika sufitowego, wieszaka transportowego Carry Bar oraz pilota sterowania ręcznego. Pod pokrywą tego kompaktowego podnośnika znajdziesz imponujący zestaw metalowych kół zębatach i najnowocześniejszą technologię w zakresie akumulatorów, która pozwoli opiekunowi bezpiecznie i bez wysiłku przenieść pacjenta o wadze do 450 lbs (204 kg) na jednym podniesieniu.


Udźwig przenośnego podnośnika GoLift Portable wynosi 450 lbs (204 kg). Nie wolno przekraczać limitu udźwigu.

Podnośnik Amico GoLift Portable jest przenośnym podnośnikiem stacjonarnym i może być montowany w różnych profilach prowadnic (wózek może być dostosowany tak aby pasował do profili prowadnic), a także bezproblemowo współpracuje z systemem Amico GoLift Portable Pendant (PLP).

Zawartość opakowania:

1. Podnośnik przenośny Amico GoLift Portable 450
2. Pilot sterowania ręcznego obsługiwany dotykiem pojemnościowym
3. Ładowarka
4. Instrukcja Użytkownika
5. Przenośny wózek

Po otrzymaniu przesyłki należy zweryfikować, w oparciu o list przewozowy, czy jest ona kompletna, a także sprawdzić czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń NIE WOLNO UŻYWAĆ urządzenia i należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika w celu złożenia reklamacji. Należy dostarczyć kompletne informacje dotyczące roszczeń odszkodowawczych lub błędów w wysyłce do Amico Mobility Solutions Corporation. Należy dołączyć wszystkie numery identyfikacyjne sprzętu wraz z opisem uszkodzonych części.

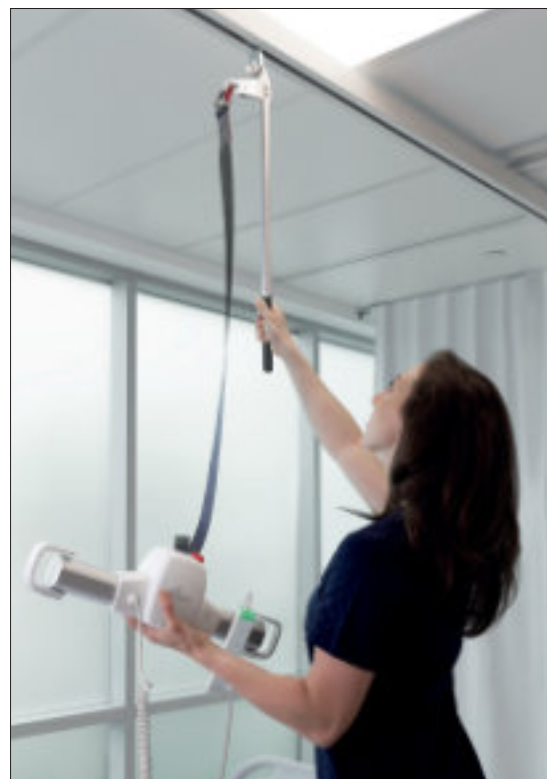

Wprowadzenie

SYMBOLE UŻYTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Symbol	Odniesienie	Tytuł
	ISO 7000-0434A	Uwaga - ryzyko niebezpieczeństwa
	TUV	Certyfikowane przez TUV
	IEC 60417-5840	Część aplikacyjna typu BF
	CE	Certyfikat Zgodności
	ISO 7010-M002	Należy odnieść się do instrukcji obsługi
	Amico Mobility	Opuszczanie awaryjne
	N/A	Nie ma zastosowani



OSTRZEŻENIE: Ten symbol ma celu ostrzeżenie użytkownika o niebezpieczeństwie lub niebezpiecznych działaniach, które mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała.

OZNACZENIA

Podnośnik przenośny GoLift 450 został zaprojektowany tak, aby spełniał następujące normy:

Norma (normy):	CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:08 Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów działania. ISO 10535:2006 Podnośniki do przemieszczania osób niepełnosprawnych - Wymagania i metody badań. CAN/CSA-C22.2 60601-1-11:2-15 użytkowanie w warunkach domowych
Produkt:	Amico GoLift Portable
Nazwa handlowa:	GoLift
Modele:	450 lbs



AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Dusseldorf
Germany

Instrukcje bezpieczeństwa



NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE, W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE DOJŚĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

- Podnośnik przenośny Amico GoLift Portable musi zostać zamontowany wyłącznie przez personel autoryzowany przez Amico Mobility Solutions Corporation
- Nie należy używać tego urządzenia przed zapoznaniem się z treścią niniejszej instrukcji.
- Zawartość niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Należy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Nigdy nie należy pozostawiać podnośnika przenośnego Amico GoLift Portable, prowadnic/PLP i kamizelki (kamizelek) pod kontrolą osoby, która nie została odpowiednio przeszkolona w zakresie obsługi i pielęgnacji tego sprzętu.
- Podnośnik przenośny Amico GoLift Portable i współpracujące z nim prowadnice/PLP i kamizelki są przeznaczone wyłącznie do przenoszenia pacjentów. Nigdy nie należy używać podnośnika GoLift Portable do innych celów.
- Gwarancja Amico Mobility jest nieważna, jeśli serwis systemu Amico GoLift Portable jest wykonywany przez nieupoważniony personel.
- W obiektach, w których więcej niż jeden opiekun jest odpowiedzialny za korzystanie z podnośnika przenośnego Amico GoLift Portable oraz współpracujących z nim prowadnic i kamizelek, ważne jest, aby wszyscy opiekunowie zostali przeszkoleni w zakresie prawidłowego użytkowania tego sprzętu. Placówka powinna opracować program szkoleniowy w celu zapoznania nowych opiekunów ze sprzętem.
- Nie należy wystawiać podnośnika przenośnego Amico GoLift Portable bezpośrednio na działanie wody. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania lub nadużywania urządzenia przenośnego Amico GoLift Portable.
- Podnośnik przenośny Amico GoLift Portable powinien być regularnie kontrolowany i konserwowany, aby zapewnić jego bezpieczne i prawidłowe działanie. Więcej na stronie 16 niniejszej instrukcji.
- Wszelkie akcesoria używane z podnośnikiem przenośnym Amico GoLift Portable, w tym prowadnice/PLP i kamizelka (kamizelki), powinny być sprawdzane w celu upewnienia się, że są one w dobrym stanie technicznym. Przed użyciem należy sprawdzić, czy nie ma oznak zużycia lub strzępienia. Należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie nietypowe zużycie lub uszkodzenia.
- Amico Mobility nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem lub celowym zniszczeniem podnośnika i związanych z nim komponentów. Nie należy próbować modyfikować/przerabiać podnośnika przenośnego Amico GoLift Portable.
- W żadnym wypadku nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia tego podnośnika. Więcej w rozdziale "Specyfikacje techniczne" niniejszej instrukcji i/lub na etykietach na podnośniku.
- Montaż podnośnika, prowadnic i kamizelki jest certyfikowany pod kątem maksymalnego obciążenia. Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia dopuszczalnego dla któregośkolwiek z elementów.
- Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli podnośnik jest używany w pobliżu łatwopalnych środków znieczulających.
- Podnośnik Amico GoLift powinien być wycofany z eksploatacji/usunięty po upływie rekomendowanego okresu użytkowania, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa.
- W przypadku pęknięcia obudowy baterii i kontaktu zawartości baterii ze skórą lub ubraniem należy natychmiast przemyć je ciepłą wodą.
- W przypadku kontaktu zawartości baterii z oczami, należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli zawartość baterii ulegnie rozlaniu, może to powodować podrażnienia dróg oddechowych. Należy zapewnić dostęp świeżego powietrza i zwrócić się o pomoc medyczną.



Nie istnieją żadne znane przeciwwskazania związane z użyciem podnośnika przenośnego Amico GoLift Portable i jego akcesoriów, pod warunkiem, że są one używane zgodnie z naszymi zaleceniami i wytycznymi.

Jednak w przypadku samodzielnego korzystania z podnośnika przenośnego Amico GoLift Portable, niezwykle ważne jest, aby pacjent mógł otrzymać pomoc podczas transferu w przypadku awarii sprzętu. Pomoc ta może być zapewniona przez wykwalifikowanego opiekuna znajdującego się w pobliżu, telefon lub inne urządzenie służące do komunikacji.

Specyfikacje techniczne podnośnika przenośnego Amico GoLift Portable

Maksymalna prędkość podnoszenia:

Bez obciążenia: 1 cal / sekunda
150 lbs/68 kg: 0.6 cala / sekunda
450 lbs/204 kg: 0.5 cala / sekunda

Waga urządzenia:

6 lbs / 2.7 kg

Bezpieczne obciążenie:

450 lbs / 204 kg

Wymiary (zob. rysunek):

Długość: 19.4 cala (49.27 cm)
Wysokość: 5.2 cala (13.20 cm)
Głębokość podnośnika: 3.5 cala (8.89 cm)
Długość paska: 74 cale (187.96 cm)

Ilość podniesień na jednym ładowaniu (Cykl pracy: 10/90)

89 przy obciążeniu 150 lbs (25% na pasku w średnim zakresie)
52 przy obciążeniu 450 lbs (25% na pasku w średnim zakresie)
Czas ładowania: 2 - 4 godziny

Obudowa podnośnika:

Materiał trudnopalny ABS
Stopień ochrony podnośnika IP23 - ochrona przed dostępem do części palcem oraz ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem do 60° od pionu

Akumulatory:

Duża pojemność, trwała bateria wodorkowo-niklowa (Ni-Mh)
1 x 24V (1.6Ah)

Ładowarka:

100-240 VAC 40 Watt

Pilot sterowania ręcznego:

Stopień ochrony pilota sterowania ręcznego IPX4

Przewodowy pilot sterowania obsługiwany przez dotyk pojemnościowy

Bezpieczeństwo:


Zatrzymanie awaryjne: Tak
Mechanizm opuszczania awaryjnego: elektryczny, działający niezależnie
Awaryjne opuszczanie ręczne
Wykrywanie górnego limitu
Wykrywanie dolnego limitu
Czujnik luźnej taśmy
Hamulec swobodnego spadania (regulator nadmiernej prędkości)
Wskaźnik niskiego poziomu baterii i rozładowania baterii
Łagodny rozruch i zatrzymanie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zgody:

CAN/CSA-C22.2 No 60601-1:08
CAN/CSA-Z10535.1:15

Przewidywana trwałość użytkowa:

22,500 cykli albo 10 lat. Zaleca się, aby wymienić podnośnik po upływie tego okresu. Przewidywana trwałość użytkowa kamizelek, akumulatorów, bezpieczników, pasków oraz linki jest zależna od właściwej konserwacji.

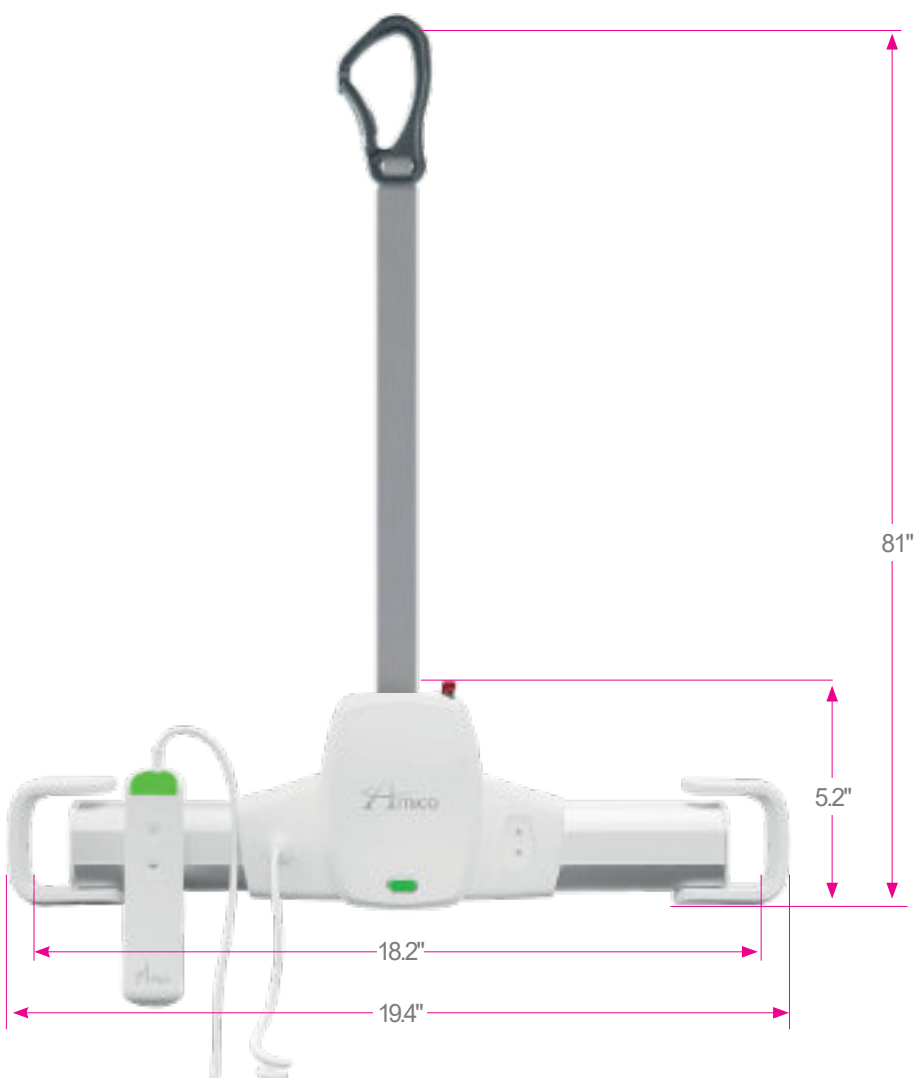

Budowa przenośnego podnośnika GoLift Portable450



Podstawowe zasady w zakresie przenoszenia pacjenta

Kamizelka podnosząca:

Podczas korzystania z przenośnego podnośnika Amico GoLift Portable 450 należy stosować kamizelkę podnoszącą, wyposażoną w cztery do sześciu pasów, które są przeznaczone do montażu na hakach. Należy umieścić pasy na hakach i upewnić się, że pętle nie znajdują się w zatrzasku aby zapobiec przypadkowemu wypadnięciu pasów.

Firma Amico Mobility nie ponosi odpowiedzialności za usterki lub wypadki wynikające z niewłaściwego użycia kamizelki podnoszącej lub z powodu niewystarczającej ostrożności ze strony opiekuna lub pacjenta.

Pracaz podnośnikiem przenośnym Amico GoLift Portable:

Podnośnik przenośny Amico GoLift Portable porusza się swobodnie w systemie prowadnic i nie ma żadnych specjalnych wymagań co do przestrzeni i zasilania w związku z przemieszczaniem. Uwaga może być w pełni skupiona na poziomie funkcjonowania użytkownika oraz na technice działania opiekunów.

Aby prawidłowo korzystać z podnośnika GoLift Portable, pacjent powinien być podnoszony tylko do takiej wysokości, aby znajdował się on ponad podłożem. Pacjent powinien być przemieszczany na tej wysokości.

Mocowanie kamizelki podnoszącej:

Należy umieścić pasy kamizelki podnoszącej na hakach podnośnika przenośnego GoLift Portable. Należy rozpocząć od znajdującego się na górze zestawu pasów (od strony pleców), a następnie umieścić najniższy położony zestaw pasów (od strony nóg).



Należy zachować ostrożność przy mocowaniu kamizelki podnoszącej na hakach. W tym celu należy sprawdzić, czy pasy przeszły całkowicie przez otwór i znalazły się na swoim miejscu na hakach wieszaka transportowego Carry Bar. Po naciśnięciu przycisku do góry w celu podniesienia pacjenta należy ponownie sprawdzić, czy wszystkie pasy zostały prawidłowo umieszczone.

Podnoszenie do i z pozycji siedzącej:

- Podczas podnoszenia pacjenta np. z wózka inwalidzkiego należy przesunąć przenośny podnośnik Amico GoLift Portable w kierunku pacjenta, który ma zostać podniesiony.
- Haki podnoszące powinny znajdować się na tej samej wysokości co klatka piersiowa pacjenta i nie powinny być przesuwane dalej nad użytkownikiem niż do okolicy połowy uda.
- Należy umieścić haki podnoszące równolegle do ramion pacjenta.
- Należy umieścić kamizelkę podnoszącą za plecami użytkownika pomiędzy oparciem krzesła a plecami użytkownika.
- Środkowy pas kamizelki podnoszącej powinien przebiegać wzdłuż kręgosłupa użytkownika. Należy poprowadzić pasy nożne wzdłuż zewnętrznych stron goleni pacjenta i pod udami pomiędzy zagłębieniem kolan a stawami biodrowymi. Należy skrzyżować pasy nożne z przodu pacjenta.
- Wszystkie cztery pasy podnoszące są teraz gotowe do przymocowania. Kamizelka podnosząca może być teraz zamontowana na hakach podnoszących.



Podstawowe zasady w zakresie przenoszenia pacjenta

Podnoszenie do i z pozycji leżącej w łóżku:

- Należy przesunąć podnośnik Amico GoLift Portable w taki sposób, aby znajdował się nad środkową częścią ciała pacjenta, który ma zostać podniesiony.
- Należy umieścić haki podnoszące równolegle do ramion pacjenta.
- Należy umieścić pacjenta na boku. Kamizelka powinna być umieszczona tak, aby górna jej część znajdowała się na tej samej wysokości co górna część głowy użytkownika. Teraz należy umieścić kamizelkę nad użytkownikiem tak, aby pas środkowy przebiegał wzdłuż kręgosłupa użytkownika. Należy obrócić użytkownika na plecy i wyciągnąć pozostałą część kamizelki podnoszącej. Proszę umieścić pasy nożne pod udami użytkownika i skrzyżować je. Wszystkie cztery pasy podnoszące są teraz gotowe do zamocowania, a kamizelkę podnoszącą można teraz zamontować na hakach podnoszących. Zaleca się podniesienie wezgłowia łóżka tak, aby pacjent znajdował się w pozycji siedzącej.
- Z podnośnika przenośnego Amico GoLift Portable mogą korzystać wyłącznie osoby, które otrzymały odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi podnośnika i montażu kamizelki.



Ważne: Zaplanuj przemieszczanie się i unikaj pozostawiania pacjenta w kamizelce bez opieki. Przed podniesieniem należy upewnić się, że w otoczeniu pacjenta nie ma elementów blokujących swobodę ruchu. Nie wolno narażać głowy, ramion, rąk czy stóp pacjenta na niebezpieczeństwo lub możliwość zakleszczenia. Należy zachować ostrożność w przypadku rurek i przewodów, które są przymocowane do pacjenta. Przed uruchomieniem oraz podnoszeniem lub opuszczaniem podnośnika należy upewnić się, że pilot sterowania ręcznego podnośnika GoLift Portable 450 i zasilający go przewód nie są zaplątane w ciało pacjenta bądź jakikolwiek inny przedmiot.


Nie należy nigdy pozostawiać podnośnika z pacjentem bez nadzoru w takim miejscu jak Oddział Psychiatryczny.

Montaż przenośnego wózka w prowadnicy Amico PLP

1. Zdemontuj obie pokrywy końcowe na ramieniu PLP




2. Upewnij się, że wózek przenośny jest poprawnie umieszczony w prowadnicy PLP

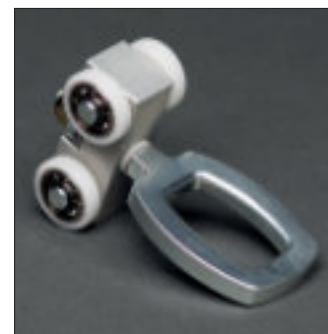

Montaż przenośnego wózka w prowadnicy Amico PLP

3. Za pomocą regulowanego klucza zdejmij ogranicznik krańcowy na prowadnicy PLP poprzez poluzowanie śrub.

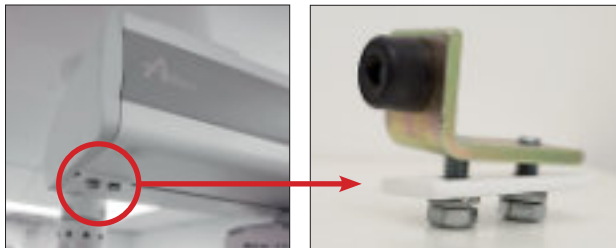


4. Zamocuj z powrotem ograniczniki krańcowe na prowadnicy PLP. Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, aby umieścić pokrywę końcową na ramieniu PLP i umieść ją z powrotem na ramieniu.

5. Dokładnie przykręć wszystkie ograniczniki krańcowe za pomocą regulowanego klucza.



UWAGA: Jeśli instalujesz urządzenie Amico GoLift Portable w istniejącym systemie prowadnic, musisz upewnić się, że maksymalne obciążenie systemu prowadnic jest równe lub wyższe niż maksymalne obciążenie urządzenia Amico GoLift Portable

6. Aby odłączyć podnośnik od wózka, należy zwolnić hak w karabińczyku.

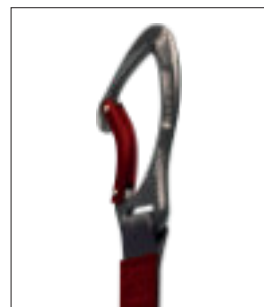

Montaż ogranicznika krańcowego na prowadnicy Amico



Użyj klucza imbusowego 3/16" aby zamocować ogranicznik krańcowy na prowadnicy



Ogranicznik krańcowy Amico

Korzystanie z drążka ReacherBardo podwieszania podnośnika

1. Opierając podnośnik na łóżku, wózku, stole lub innym nieruchomym obiekcie, użyj przycisku obniżania umieszczony na podnośniku lub pilocie sterowania ręcznego, aby zwolnić wystarczającą ilość paska do punktu, który pozwoli Ci na połączenie karabinka z wózkiem bez konieczności podnoszenia podnośnika z jego pozycji.

2. Otwórz zatrzask karabińczyka, naciskając kolorowy zatrzask w kierunku tylnej części karabinka. To "otwiera" karabinek tak, aby można go było przymocować do uchwyty drążka Reacher Bar. Po zahaczeniu karabinka na uchwycie drążka Reacher Bar, zwolnij zatrzask karabińczyka tak, aby był zamknięty, a tym samym zablokowany we właściwym miejscu.

3. Podnieś drążek Reacher Bar do wózka. Upewnij się, że na pasku nośnym jest wystarczająco dużo luzu, aby wykonać ten krok, w przeciwnym razie nie będzie możliwe jego zaczepienie.

4. Zaczep górny hak drążka Reacher Bar na wózku. Upewnij się, że na pasku nośnym jest wystarczająco dużo luzu, aby wykonać ten krok, w przeciwnym razie nie będzie możliwe jego zaczepienie.

5. Podnośnik został teraz bezpiecznie zawieszony na wózku. Drążek pozostaje na swoim miejscu do momentu usunięcia podnośnika.



Otwórz karabińczyk w celu zamocowania go w otworze drążka Reacher Bar.



Zamknij karabińczyk przymocowany do uchwyty drążka Reacher Bar.



Podnieś drążek Reacher Bar do wózka.



Zaczep górny hak drążka Reacher Bar na wózku.



Podnośnik jest bezpiecznie zawieszony na wózku. Drążek Reacher Bar pozostaje na swoim miejscu.

Magnetyczne przyłącze pilota ręcznego sterowania do przenośnego podnośnika GoLift Portable

Sterowanie ręczne za pomocą dotyku pojemnościowego umożliwia użytkownikom o ograniczonej sprawności bezproblemową obsługę urządzenia.

Magnetyczne przyłącze sterowania ręcznego umożliwiające szybkie mocowanie do podnośnika przenośnego Amico GoLift Portable.



Nie należy umieszczać pilota sterowania ręcznego w odległości mniejszej niż 5" od rozrusznika serca. Pacjenci z rozrusznikiem serca muszą postępować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez ich lekarzy.



Użytkowanie podnośnika przenośnego GoLift Portable

Podnośnik Amico GoLift włącza się automatycznie po naciśnięciu przycisku na pilocie ręcznego sterowania.

Podnośnik Amico GoLift wyłącza się automatycznie po około trzech minutach bez aktywacji.



Ładowanie podnośnika przenośnego GoLift Portable

Ładowarkę podłącza się do portu w urządzeniu GoLift Portable.

Podczas ładowania podnosnik musi być włączony! - PRZEŁĄCZNIK W POZYCJI I.

Upewnij się, że kabel zasilający jest mocno wciśnięty w gniazdo ładowarki a na ładowarce świeci się zielona dioda.

Baterie powinny być regularnie ładowane. Zaleca się, aby podłączać podnośnik do ładowania, gdy nie jest używany, oraz pod koniec każdego dnia - na noc. Pozwoli to zmaksymalizować żywotność akumulatorów.

Podnośnik GoLift może pozostać podłączony do ładowarki na czas nieokreślony, ponieważ ładowarka ma wbudowany regulator, co eliminuje niebezpieczeństwo przeładowania.

Co do zasady, gdy podnośnik nie jest używany, należy ustawić go na tyle wysoko, aby nie przeszkadzał i nie stanowił przeszkody.



Nie należy nadmiernie rozładowywać baterii. Spowoduje to radykalne skrócenie żywotności baterii. Jeśli rozlega się powolny sygnał dźwiękowy, należy jak najszybciej naładować baterie



Jeśli podnośnik przenośny GoLift Portable nie zostanie podłączony z powrotem do ładowarki, baterie zostaną rozładowane i uszkodzone.

Funkcje wskaźników LED i sygnalizacji dźwiękowej

Ładowanie	Bateria	Główny wskaźnik LED podnośnika	Główny sygnał dźwiękowy podnośnika
Tak	W pełni naładowana	Zielony	Nie ma zastosowania
Nie	W pełni naładowana	Zielony	Nie ma zastosowania
Tak	Częściowo naładowana	Pomarańczowy	Nie ma zastosowania
Nie	Niski poziom baterii	Miga na pomarańczowo	Nie ma zastosowania
Nie	Bardzo niski poziom baterii	Czerwony (tryb ciągły)	Sygnał dźwiękowy co 3 sekundy
Nie	Przeciążenie baterii	Miga na czerwono	Ciągły sygnał dźwiękowy przy przeciążeniu podnośnika
Tak	W trakcie ładowania	Pomarańczowy (tryb ciągły)	Nie ma zastosowania
Tak	Doładowanie	Pomarańczowy (tryb ciągły) przez 5 sekund po podłączeniu ładowarki a następnie zielony (tryb ciągły)	Nie ma zastosowania
Tak	Przegrzanie baterii / błąd czujnika	Miga na czerwono	1 sygnał dźwiękowy co 5 sekund
Tak	Nie wykryto czujnika temperatury	Miga na czerwono 3 razy na sekundę, następnie gaśnie na 1 sekundę	1 sygnał dźwiękowy co 5 sekund
	Funkcja / Błąd	Główny wskaźnik LED podnośnika	Główny sygnał dźwiękowy podnośnika
	Gotowe do naprawy	Miga 4 razy na zielono	Nie ma zastosowania
	Wyłączenie awaryjne	Czerwony (tryb ciągły)	2 sygnały dźwiękowe na sekundę
Połączenie	Funkcja / Błąd	Wskaźnik LED pilota sterowania ręcznego	Sygnał dźwiękowy pilota sterowania ręcznego
Nie ma zastosowania	Rozłączone / wyszukiwanie	Miga na zielono a następnie na czerwono trzy razy	Nie ma zastosowania
Nie ma zastosowania	Niski poziom baterii	Czerwony (tryb ciągły)	Nie ma zastosowania
Podłączone	Pokaż stan głównego wskaźnika LED podnośnika	Pokaż stan głównego wskaźnika LED podnośnika	Nie ma zastosowania
Alarm serwisowy			
Po wykonaniu 1001 podniesień, wskaźnik LED miga na zielono			
Aby zresetować należy nacisnąć przycisk W GÓRĘ następnie przycisk W DÓŁ następnie przycisk W GÓRĘ, następnie przycisk W DÓŁ, a następnie przytrzymać oba przyciski przez 10 sekund.			
Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, wskaźnik LED zmieni kolor na czerwony, zielony i pomarańczowy. Rozlegnie się trzykrotny sygnał dźwiękowy.			
Należy pamiętać, że reset można przeprowadzić w dowolnym momencie, a nie tylko po wykonaniu 1000 podniesień.			

Zatrzymanie awaryjne

Urządzenie przenośne GoLift Portable posiada również funkcję awaryjnego wyłączania zasilania, która pozwala operatorowi na całkowite odcięcie zasilania podnośnika w przypadku awarii. Po jednokrotnym naciśnięciu CZERWONEJ zawlecзки awaryjnej, umieszczonej na górnej części podnośnika, urządzenie natychmiast się zatrzyma, a wszystkie jego funkcje zostaną wyłączone. Lampka kontrolna ON zgaśnie, a przycisk wyłączania awaryjnego znajdujący się wewnątrz podnośnika zostanie wysunięty. Po wystąpieniu sytuacji awaryjnej podnośnik musi zostać skontrolowany przed jego ponownym uruchomieniem. Aby przywrócić zasilanie podnośnika, należy delikatnie pociągnąć za zawleczkę.



Nie należy naciskać zawlecзки na siłę. W celu uzyskania pomocy w nagłym wypadku należy skontaktować się z LeviCare Sp. z o.o. pod adresem: info@levicare.pl lub 48 796-980-503



Opuszczanie awaryjne


W przypadku, gdy przycisk W DÓŁ na pilocie ręcznego sterowania nie działa, lub w sytuacji braku zasilania, pacjent może zostać opuszczony poprzez naciśnięcie i przytrzymanie CZERWONEGO przycisku zatrzymania awaryjnego znajdującego się na górnej części podnośnika. Przycisk powinien być wciśnięty aż do momentu kiedy pacjent zostanie bezpiecznie opuszczony do żądanej pozycji. Podnośnik będzie emitował sygnał dźwiękowy podczas naciskania przycisku, aż do momentu jego zwolnienia po osiągnięciu żądanego poziomu opuszczenia.

UWAGA: Przycisk opuszczania awaryjnego nie zapewnia funkcji podnoszenia. Awaria któregośkolwiek z mechanizmów opuszczających powinna być zgłaszana do Amico Mobility.



W nagłych przypadkach, gdy standardowy system opuszczania działa nieprawidłowo i zostanie użyta funkcja "opuszczania awaryjnego", przed ponownym użyciem urządzenie musi zostać zresetowane przez wykwalifikowanego technika.

CZERWONY przycisk awaryjny

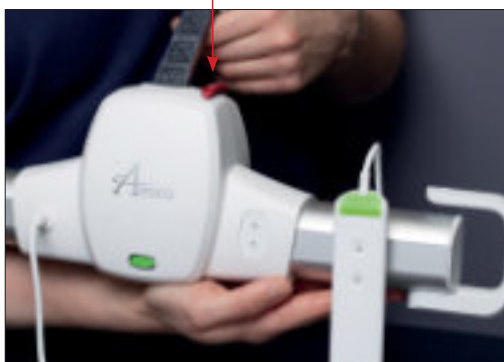

Przycisk powinien być wciśnięty aż do momentu, kiedy pacjent jest bezpiecznie opuszczony do żądanej pozycji.

Ręczne opuszczanie i podnoszenie awaryjne

Ręczne opuszczanie i podnoszenie awaryjne powinno być stosowane tylko wtedy, gdy opuszczanie awaryjne nie działa. W celu wyjęcia wtyczki z pokrywy może być konieczne użycie odpowiedniej drabiny lub stołka. Należy wyjąć okrągły korek z pokrywy podnośnika i użyć klucza imbusowego 3/16" lub 2,5 mm, aby obrócić silnik w górę lub w dół.



Uwaga: NIE należy próbować używać podnośnika podczas ręcznego opuszczania.

Należy wyjąć okrągły korek z pokrywy podnośnika i użyć klucza imbusowego 3/16" lub 2,5 mm, aby obrócić silnik w górę lub w dół.

Hamulec odśrodkowy

Hamulec odśrodkowy jest wykonany z metalowego drążka przymocowanego do bębna. W przypadku uszkodzenia przekładni lub silnika, na skutek siły działającej odśrodkowo, nastąpi blokada drążka względem ramy.

Czyszczenie i dezynfekcja

Zewnętrzną część przenośnego podnośnika GoLift Portable należy czyścić i dezynfekować wyłącznie przy użyciu zalecanych środków czyszczących przedstawionych poniżej. Należy zwilżyć ściereczkę środkiem czyszczącym i wytrzeć całą zewnętrzną część podnośnika. Do czyszczenia i dezynfekcji urządzenia nie należy używać innych środków chemicznych i/lub płynów, które nie zostały wymienione na liście.



Należy zwracać szczególną uwagę, aby do wnętrza podnośnika przenośnego Amico GoLift Portable nie dostały się żadne płyny. Urządzenie nie jest odporne na przeciekanie ani nie jest wodoszczelne. Brak ochrony podnośnika przed płynami może doprowadzić do jego uszkodzenia i spowodować obrażenia ciała.

Rekomendowane środki czyszczące:

- Virox Accel TB
- Virox 5
- Dispatch Hospital Cleaner ręczniki do czyszczenia i dezynfekcji z wybielaczem
- Clorox Healthcare Professional dezynfekujące chusteczki z wybielaczem
- Sani-Cloth Super jednorazowe chusteczki bakteriobójcze
- Viroidin-X

Co 4 miesiące należy czyścić wnętrze prowadnic wilgotną szmatką, aby zapewnić wózkowi lepszą powierzchnię do poruszania się.

Rozwiązywanie i usuwanie problemów

Jeśli pojawiają się problemy z korzystaniem z podnośnika przenośnego Amico GoLift Portable, zapoznaj się z poniższą tabelą. Znajdź usterkę i zastosuj zalecane rozwiązanie. Jeśli usterka nie została znaleziona i lub/i rozwiązanie nie usuwa problemu, skontaktuj się z firmą Amico Mobility.

Usterka	Rozwiązanie
Podczas pracy przenośny podnośnik GoLift Portable emituje cichy sygnał dźwiękowy. Podnośnik porusza się w dół, ale nie porusza się w kierunku do góry.	Niski poziom baterii - należy naładować podnośnik.
Podnośnik przenośny GoLift Portable nie podnosi.	Jeśli obciążenie jest większe niż bezpieczny udźwig, podnośnik przenośny GoLift Portable nie będzie działał ze względu na zabezpieczenie nadprądowe.
Baterie są wciąż rozładowane po kilku ładowaniach.	Należy wymienić baterie, gdyż mógł upłynąć okres ich użytkowania.
Podnośnik nie reaguje po naciśnięciu przycisków na pilocie sterowania ręcznego	Należy sprawdzić czy nie została pociągnięta linka zatrzymania awaryjnego
Podnośnik nie porusza się w górę	Pasek nośny może być skręcony.

Przegląd i konserwacja

Przed użyciem podnośnika Amico GoLift, przeglądy powinny być przeprowadzane zgodnie z następującym harmonogramem:

Element	Przed każdym użyciem	Raz w miesiącu	Raz w roku
Podnośnik przenośny GoLift Portable			
Upewnij się, że zainstalowane są ograniczniki krańcowe	•		
Sprawdź, czy pasek nie jest zużyty lub postrzępiony	•		
Upewnij się, że baterie są naładowane	•		
Sprawdź haki pod kątem uszkodzeń lub ostrych krawędzi			•
Sprawdź kółka w przenośnym wózku. Jeśli są uszkodzone, należy je wymienić.			•
Kamizelka			
Sprawdź, czy paski nie są zużyte lub postrzępione	•		
Sprawdź kamizelkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń materiału		•	
Upewnij się, że nie ma żadnych poluzowanych nici w szwach.	•		
Konserwacja przez certyfikowanego technika			
Sprawdź pasek i wymień jedynie jeśli jest zużyty lub postrzępiony			•
Skontroluj przekładnię pod kątem ewentualnych nietypowych odgłosów			•
Sprawdź, czy nie ma żadnych pęknięć w elementach haków			•
Sprawdź koła zębate pod kątem ewentualnych złamanych lub zużytych zębów			•
** Sprawdź, czy hamulec odśrodkowy działa swobodnie			•
Sprawdź zawleczkę zatrzymania awaryjnego			•
** Sprawdź mechanizm opuszczania awaryjnego			•
*Roczny test obciążeniowy z SWL (maksymalne bezpieczne obciążenie robocze)			•
Upewnij się, że zainstalowane są ograniczniki krańcowe			•

*Zgodnie z normą ISO 10535 "Podnośniki do przemieszczania osób niepełnosprawnych - Wymagania i metody badań" należy przeprowadzać kontrolę podnośnika przenośnego GoLift Portable przynajmniej raz w roku. Kontrola ta powinna być wykonana przez wykwalifikowanego technika i powinna obejmować test obciążenia roboczego w jednym (1) cyklu podnoszenia z maksymalnym obciążeniem.

**Te dwie funkcje muszą być sprawdzone przez wykwalifikowanego technika, aby zapewnić podstawowe działanie podnośnika przenośnego GoLift Portable.



Nie wolno używać podnośnika GoLift, dopóki wszelkie problemy wykryte podczas kontroli nie zostaną rozwiązane przez wykwalifikowanego technika.

Systemy GoTracki konstrukcja wspierająca


Konfiguracje GoTrack

Oferujemy trzy różne profile prowadnic, jak również modułowe i niestandardowe konfiguracje, które dostępne są jako:


- prowadnice proste
- systemy zakrzywione (zakręty)
- pełne pokrycie pomieszczenia (trawersy: system X/Y lub H)
- opcjonalna prowadnica kontroli infekcji
- opcjonalne systemy prowadnic do zabudowy, do montażu podtynkowegoTrack

Wszystkie systemy GoTrack cechuje:


- Niewielka waga i duża pojemność
- Szybka i wygodna instalacja
- Ukryte ograniczniki krańcowe dla bezpieczeństwa
- Możliwość ładowania w dowolnym miejscu

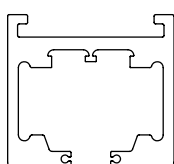

Regularny

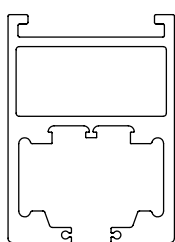

Podwójny

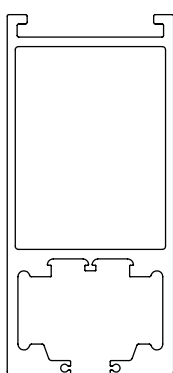

Potrójny



Description	Part Number	Length x Width x Height	Product Weight	Material
Regularny	TRK-REG-96	96 x 2.63 x 2.36" / 2440 x 67 x 60 mm	8.3 lbs / 3.77 kg	Aluminium malowane proszkowo - kolor biały
Regularny	TRK-REG-120	120 x 2.63 x 2.36" / 3050 x 67 x 60 mm	8.3 lbs / 3.77 kg	Aluminium malowane proszkowo - kolor biały
Regularny	TRK-REG-240	240 x 2.63 x 2.36" / 6100 x 67 x 60 mm	8.3 lbs / 3.77 kg	Aluminium malowane proszkowo - kolor biały
Podwójny	TRK-DBL-120	120 x 2.63 x 3.55" / 3050 x 67 x 90 mm	10.4 lbs / 4.72 kg	Aluminium malowane proszkowo - kolor biały
Podwójny	TRK-DBL-150	150 x 2.63 x 3.55" / 3800 x 67 x 90 mm	10.4 lbs / 4.72 kg	Aluminium malowane proszkowo - kolor biały
Podwójny	TRK-DBL-240	240 x 2.63 x 3.55" / 6100 x 67 x 90 mm	10.4 lbs / 4.72 kg	Aluminium malowane proszkowo - kolor biały
Potrójny	TRK-TRP-120	120 x 2.63 x 5.75" / 3050 x 67 x 146 mm	12.4 lbs / 5.65 kg	Aluminium malowane proszkowo - kolor biały
Potrójny	TRK-TRP-240	240 x 2.63 x 5.75" / 6100 x 67 x 146 mm	12.4 lbs / 5.65 kg	Aluminium malowane proszkowo - kolor biały

na zamówienie Aluminium malowane proszkowo - k. biały

Warunki otoczenia

Eksploatacja		
	Minimum	Maksimum
Temperatura	+10°C	+40°C
Wilgotność względna	30%	75%
Ciśnienie atmosferyczne	700 hPa	1060 hPa


Transport / Przechowywanie		
	Minimum	Maksimum
Temperatura	-10°C	+50°C
Wilgotność względna	20%	90%
Ciśnienie atmosferyczne	700 hPa	1060 hPa

UWAGA: Zaleca się, aby pomiędzy kolejnymi użyciami podnośnik został przeniesiony z powrotem do pomieszczenia utrzymywanego w temperaturze pokojowej.

Na przykład po transporcie w pojeździe nie należy zostawiać podnośnika w bagażniku lub na tylnym siedzeniu.

Należy również starać się unikać pozostawiania podnośnika w pomieszczeniach z metalowym dachem, gdzie temperatura może przekroczyć dopuszczalną temperaturę eksploatacji.

Oznaczenia na opakowaniu:

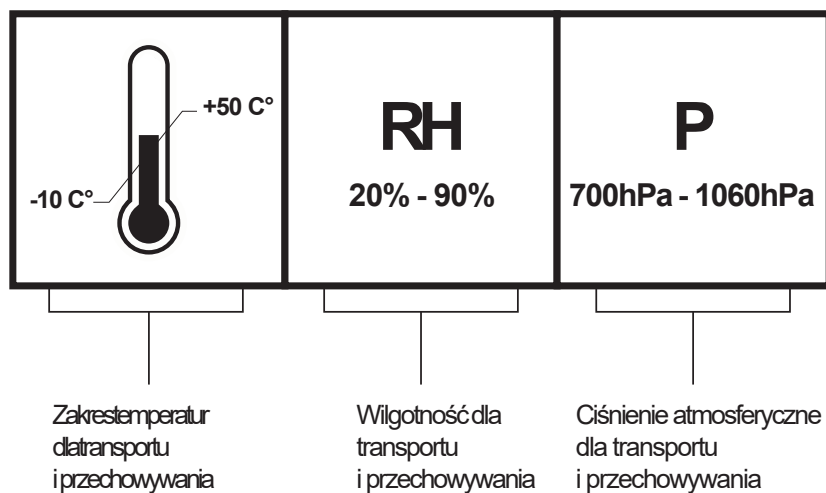

Dane dotyczące zgodności elektromagnetycznej przenośnego podnośnika Amico GoLift Portable

Wytyczne i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne		
[URZĄDZENIE lub SYSTEM] jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik [URZĄDZENIA lub SYSTEMU] powinien upewnić się, że jest ono używane w takim środowisku.		
Test emisji	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne
Emisje fal o częstotliwości radiowej Norma CISPR 11	Groupa 1	[URZĄDZENIE lub SYSTEM] wykorzystuje energię radiową tylko do swoich wewnętrznych funkcji. W związku z tym emisje fal radiowych są bardzo niskie i prawdopodobnie nie spowodują żadnych zakłóceń w pracy urządzeń elektronicznych znajdujących się w pobliżu.
Emisje fal o częstotliwości radiowej Norma CISPR 11	Klasa A	[URZĄDZENIE lub SYSTEM] może być używane we wszystkich budynkach, oprócz budynków mieszkalnych oraz obiektów bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.
Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2	Klasa A	
Wahania napięcia / emisje migotania IEC 61000-3-3	Spełnia wymagania	

Należy unikać używania tego sprzętu w sąsiedztwie lub w zestawieniu z innym sprzętem, ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowej pracy. Jeśli takie użycie jest konieczne, należy obserwować to urządzenie i inne urządzenia, aby sprawdzić, czy działają normalnie.

Użycie akcesoriów i kabli innych niż określone przez Amico Mobility może skutkować zwiększoną emisją elektromagnetyczną lub obniżoną odpornością elektromagnetyczną tego urządzenia i spowodować jego nieprawidłową pracę.

Przenośny sprzęt łączności radiowej nie powinien znajdować się bliżej niż 30 cm od jakiejkolwiek części Amico GoLift Portable 450. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia działania tego urządzenia.

Dane dotyczące zgodności elektromagnetycznej przenośnego podnośnika Amico GoLift Portable

Wytyczne i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne			
[URZĄDZENIE lub SYSTEM] jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik [URZĄDZENIA lub SYSTEMU] powinien upewnić się, że jest ono używane w takim środowisku.			
Test odporności	Poziom testowy IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne
Wyladowanie elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV styk ±8 kV powietrze	±6 kV styk ±8 kV powietrze	Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub wykonane z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić przynajmniej 30%.
Szybkoszienne zakłócenia przejściowe IEC 61000-4-4	±2 kV dla linii zasilających ±1 kV dla linii wejście/wyjście	±1 kV dla linii zasilających ±0.250 kV dla linii wejście/wyjście	Jakość zasilania powinna odpowiadać warunkom typowym dla środowiska handlowego lub szpitalnego.
Skoki napięcia IEC 61000-4-5	±1 kV linia do linii ±2 kV linia do uziemienia	±1 kV linia do linii ±2 kV linia do uziemienia	Jakość zasilania powinna odpowiadać warunkom typowym dla środowiska handlowego lub szpitalnego.
Spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na wejściach linii zasilania IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % spadek UT) dla 0,5 cyklu 40 % UT (60 % spadek UT) dla 5 cykli 70 % UT (30 % spadek UT) dla 25 cykli <5 % UT (>95 % spadek UT) przez 5 sekund	<5 % UT (>95 % spadek UT) dla 0,5 cyklu 40 % UT (60 % spadek UT) dla 5 cykli 70 % UT (30 % spadek UT) dla 25 cykli <5 % UT (>95 % spadek UT) przez 5 sekund	Jakość zasilania powinna odpowiadać warunkom typowym dla środowiska handlowego lub szpitalnego. Jeśli klient lub użytkownik [URZĄDZENIA lub SYSTEMU] wymaga ciągłego korzystania z urządzenia nawet podczas przerw w zasilaniu, zaleca się podłączenie [URZĄDZENIA lub SYSTEMU] do zasilacza awaryjnego lub akumulatora.
Częstotliwość zasilania (50/60 Hz) Pole magnetyczne IEC 61000-4-8	3 A / m	Nie ma zastosowania	Poziom pól magnetycznych źródeł zasilania powinien mieścić się w granicach obowiązujących dla typowego środowiska handlowego lub szpitalnego.
UWAGA: UT to napięcie zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testowego.			

Dane dotyczące zgodności elektromagnetycznej przenośnego podnośnika Amico GoLift Portable

Wytyczne i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne			
[URZĄDZENIE lub SYSTEM] jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik [URZĄDZENIA lub SYSTEMU] powinien upewnić się, że jest ono używane w takim środowisku.			
Test emisji	Poziom testowy IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne
√Przewodzony sygnał o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz do 80 MHz	3 Vrms	Przenośne i ruchome środki łączności radiowej powinny być używane w odległości od jakichkolwiek elementów [URZĄDZENIA ME lub SYSTEMU ME] łącznie z jego przewodami, która jest nie mniejsza niż odległość zalecana, obliczona z równania częstotliwości nadajnika
Emitowany sygnał o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz do 2,5 GHz	3 V/m	Zalecana odległość $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P} \text{ 80 MHz to 800 MHz}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \text{ 800 MHz to 2,5 GHz}$ gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta nadajnika, a d jest zalecaną odległością w metrach (m). Natężenia pól pochodzących od stałych nadajników RF, jak określono w pomiarach pól elektromagnetycznych w terenie ^a powinny być niższe niż poziom zgodności dla każdego zakresu częstotliwości ^b Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem: 

UWAGA1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości.

UWAGA2: Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi.

^aNatężenia pól pochodzących od nadajników stałych, takich jak nadajniki bazowe telefonów wykorzystujących łączność bezprzewodową (komórkowych, bezprzewodowych), przenośnych amatorskich nadajników radiowych, nadajników AM i FM oraz telewizyjnych, nie można wyliczyć teoretycznie z odpowiednią dokładnością. W celu dokonania oceny środowiska elektromagnetycznego wytwarzanego przez nadajniki radiowe należy rozważyć przeprowadzenie pomiarów elektromagnetycznych w terenie. Jeśli zmierzone w terenie natężenie pola w okolicy [URZĄDZENIA ME lub SYSTEMU ME] przewyższa dopuszczalny poziom zgodności dot. częstotliwości radiowej, należy prowadzić obserwację [URZĄDZENIA ME lub SYSTEMU ME], aby potwierdzić prawidłowe działanie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania mogą być konieczne inne działania zaradcze, jak np. odwrócenie [URZĄDZENIA ME lub SYSTEMU ME] w inną stronę lub przestawienie [URZĄDZENIA ME lub SYSTEMU ME] w inne miejsce.

^b Dla zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe niż 3 V/m.

Dane dotyczące zgodności elektromagnetycznej przenośnego podnośnika Amico GoLift Portable

Zalecane odległości między przenośnymi i ruchomymi środkami łączności radiowej a urządzeniami a [URZĄDZENIEM lub SYSTEMEM]

[URZĄDZENIE lub SYSTEM] jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, gdzie zakłócenia spowodowane sygnałem o częstotliwości radiowej można kontrolować. Klient lub użytkownik [URZĄDZENIA lub SYSTEMU] może starać się unikać zakłóceń elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnej odległości między przenośnymi i ruchomymi środkami łączności radiowej (nadajnikami) a [URZĄDZENIEM lub SYSTEMEM], jak zalecono poniżej, zależnie od maksymalnej mocy znamionowej sprzętu do łączności radiowej.

Maksymalna moc znamionowa nadajnika W	Odległość zależna od częstotliwości nadajnika M		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz to 2,5 GHz $d = 1.2\sqrt{P}$
0,01	0.12	0.12	0.23
0,1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Dla nadajników o maksymalnej mocy znamionowej nieuwzględnionej powyżej zalecaną odległość d w metrach (m) można obliczyć ze wzoru na częstotliwość nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta.

UWAGA1: Dla 80 MHz i 800 MHz należy stosować taką odległość, jak dla zakresu wyższych częstotliwości.

UWAGA2: Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi.

Utylizacja

- Podnośnik przenośny Amico GoLift Portable nie zawiera żadnych niebezpiecznych substancji
- Elementy składowe podnośnika Amico GoLift Portable powinny być prawidłowo zutylizowane po zakończeniu okresu przydatności do użycia.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są starannie oddzielone.
- Płyty przewodzące prąd elektryczny powinny być poddane odpowiedniemu procesowi recyklingu.
- Pozostałe elementy powinny być utylizowane odpowiednio do zawartych w nich surowców.



Polityka gwarancyjna - Mobility Solutions

Podstawowym celem naszego systemu podnośników sufitowych jest bezpieczne podnoszenie, przenoszenie i zmiana pozycji pacjenta przy jak najmniejszym wysiłku opiekuna, niezależnie od rodzaju pomieszczenia. Podnośnik GoLift firmy Amico Mobility Solutions Corporation jest łatwy w obsłudze i bezpieczny w użyciu zarówno dla opiekunów, jak i pacjentów. Systemy podnośników pasują do wszystkich warunków otoczenia i spełniają najwyższe wymagania w zakresie funkcjonalności, bezpieczeństwa i niezawodności.

Firma Amico Mobility Solutions Corporation gwarantuje, że jej urządzenia podnoszące i ich wykonanie będą wolne od wad przez okres trzech (3) lat od daty montażu. Obejmuje to prowadnice, silnik podnośnika, wieszak transportowy Carry Bar i akcesoria. Kamizelki Amico posiadają gwarancję na okres dwóch (2) lat.

W tym okresie Amico Mobility Solutions Corporation wymieni każdą część (bez dodatkowych opłat), która zostanie uznana za wadliwą. Koszty wysyłki i montażu po pierwszych dwunastu (12) miesiącach będą ponoszone przez klienta. Obowiązują następujące wyłączenia: gwarancja na baterie obowiązuje przez okres trzech (3) miesięcy od momentu montażu; gwarancja na zasilacz wynosi jeden (1) rok od momentu montażu.

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy produkt został prawidłowo zainstalowany, zgodnie ze specyfikacjami Amico Mobility Solutions Corporation. Obejmuje to między innymi prawidłowe użytkowanie i serwisowanie systemów zgodnie z zaleceniami producenta. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w transporcie, na skutek wypadku, niewłaściwego użycia, nadużycia, zaniedbania, nieprawidłowej obsługi, przeróbek, niewłaściwego zastosowania lub uszkodzeń, które mogą być spowodowane działaniem siły wyższej.

Amico Mobility Solutions Corporation nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe powstałe w następstwie korzystania ze sprzętu.

Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji muszą być najpierw zatwierdzone przez Dział Obsługi Klienta Amico Mobility Solutions Corporation pod adresem amo-service@amico.com lub 1.877.462.6426. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac serwisowych należy uzyskać od Amico Mobility Solutions Corporation ważny numer Autoryzacji Zwrotu Towarów (RGA). Koszty prac gwarancyjnych, które nie zostały autoryzowane przez Amico Mobility, nie będą zwracane.



Notatki

Notatki

Notatki

796 980 503 

info@levicare.pl <

www.levicare.sklep.pl 

www.levicare.pl 



<;:98;76958  43251: 0/

Amico Mobility Solutions Corporation | 122-B East Beaver Creek Road, Richmond Hill, ON L4B 1G6, Canada
600 Prime Place, Hauppauge, NY 11788, USA
Toll Free Phone: 1.877.462.6426 | Toll Free Fax: 1.866.440.4986 | Tel: 905.764.0800 | Fax: 905.764.0862
Email: amo-service@amico.com | www.amico.com



AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Germany